



# TIMSTOCK MDD



funktionsverket

# Timstock MDD



Timstock MDD är ett svensktutvecklat tidshjälpmedel som visuellt räknar ner tid med hjälp av röda lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en till dess att tiden är slut och då blinkar och larmar Timstock MDD.

## Visuell nedräkning av tid

Timstock MDD hjälper personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Om du inte förstår eller kan hantera en konventionell klocka är det svårt att veta NÄR någonting skall inträffa eller HUR LÄNGE du ska hålla på med en aktivitet.

Timstock MDD kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den.

Nedräkningen av tid visualiseras med en rad röda lysdioder som slocknar, en efter en, allteftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden har gått ut blinkar hela raden och därefter ljuder fem korta signaler.

## Bär den med dig hela dagen

Timstock är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och vara till hjälp för användaren under hela dagen.

På morgonen kan timstocken göra att du inte fastnar i badrummet eller vid frukostbordet, lite senare under dagen kan den hjälpa till att hålla reda på när rasten är slut och på kvällen kan den visa hur lång tid du kan sitta vid datorn, TV:n eller surfplattan.

## Klisterlappar för färgkodning

Vid leverans ingår en karta med klisterlappar, som kan användas för att t.ex. färgmarkera aktivitetsbilder på scheman.

Produktbenämning	Artikelnummer
Timstock MDD 8 min	201280
Timstock MDD 20 min	201220
Timstock MDD 20 min stående	201221
Timstock MDD 60 min 12 dioder	201210
Timstock MDD 60 min 20 dioder	201200
Timstock MDD 80 min	201230
Timstock MDD 8 timmar	201300
Timstock MDD paket 8 min	202280
Timstock MDD paket 20 min	202220
Timstock MDD paket 20 min stående	202221
Timstock MDD paket 60 min 12 dioder	202210
Timstock MDD paket 60 min 20 dioder	202200
Timstock MDD paket 80 min	202230
Timstock MDD paket 8 timmar	202300
Timstock tillbehör - skyddsväska	110800
Timstock tillbehör - nyckelband	110700

Timstock MDD och Timstock MDD paket är klassade som Medicintekniska produkter och uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).





# Så fungerar Timstock MDD

## Ställ in tiden med ett enda tryck

Tryck på den startknapp (röd, gul, grön eller blå) som motsvarar den önskade tiden. Det antal lysdioder som startknappen representerar tänds och nedräkningen startar.

Allteftersom tiden går släcks lysdioderna en efter en.

## Visuellt och auditivt larm

När den inställda tidsperioden är slut blinkar samtliga lysdioder som ett visuellt larm, och en kort ljudsignal hörs fem gånger som auditivt larm.

## Ljudvolymen går att justera

Ljudsignalen kan justeras med hjälp av volymratten på sidan av Timstock MDD. Pågående signalering kan också avbrytas genom att man trycker på någon av knapparna.

## Dubbelkommando för nollställning

Du kan avbryta en påbörjad nedräkning genom att trycka ner den röda och den blå startknappen samtidigt under 2 sekunder. Därefter kan ny tid startas. Detta dubbelkommando förhindrar oavsiktlig ändring av inställd tid.

## Batteridrivnen

I leveransen ingår 2 st alkaliska 1,5 V batterier typ R6. Dessa räcker för ca. 60 timmars användning. Laddningsbara batterier av typ NiMH, storlek R6 kan också användas.

## Specifikationer

Ytermått (L x B x H): 111 x 52 x 27 mm  
Vikt: 115 g



# Timstock MDD varianter

## Timstock MDD 8 min

Varje lysdiod motsvarar 30 sek.

Vid start tänds:  
16 dioder för 8 min  
12 dioder för 6 min  
8 dioder för 4 min  
4 dioder för 2 min



## Timstock MDD 20 min

Varje lysdiod motsvarar 1 min.

Vid start tänds:  
20 dioder för 20 min  
15 dioder för 15 min  
10 dioder för 10 min  
5 dioder för 5 min



## Timstock MDD 20 min stående

Varje lysdiod motsvarar 1 min.

Vid start tänds:  
20 dioder för 20 min  
15 dioder för 15 min  
10 dioder för 10 min  
5 dioder för 5 min



## Timstock MDD 60 min 20 dioder

Varje lysdiod motsvarar 3 min.

Vid start tänds:  
20 dioder för 60 min  
15 dioder för 45 min  
10 dioder för 30 min  
5 dioder för 15 min



## Timstock MDD 60 min 12 dioder

Varje lysdiod motsvarar 5 min.

Vid start tänds:  
12 dioder för 60 min  
9 dioder för 45 min  
6 dioder för 30 min  
3 dioder för 15 min





### Timstock MDD 80 min

Varje lysdiod motsvarar 4 min.

Vid start tänds: 20 dioder för 80 min  
15 dioder för 60 min  
10 dioder för 40 min  
5 dioder för 20 min



### Timstock MDD 8 timmar

Varje lysdiod motsvarar 30 min.

Vid start tänds: 16 dioder för 8 tim  
12 dioder för 6 tim  
8 dioder för 4 tim  
4 dioder för 2 tim



Timstock MDD och Timstock MDD paket är klassade som Medicin-  
tekniska produkter och uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS  
2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).



# Timstock MDD paket



Timstock MDD + skyddsväska  
= Timstock MDD paket



# Tillbehör skyddsväska



## Full tillgång till aktiveringsknapparna

Väskan passar alla olika modeller av Timstock MDD och ger ett skydd i fuktiga miljöer.

Väskan har tre spärrar som ska stängas noga för den skall ge ett effektivt skydd: en tryckförslutning och två kardborrband.

Skyddsväskan har ett plastfönster som gör att timstockens knappar syns igenom. Knapparna kan aktiveras även när timstocken befinner sig inuti skyddsväskan.

Den inbyggda "flytkudden" gör att den håller sig flytande även om den råkar hamna i vatten. Den har dessutom en bälteshake som gör det enkelt att fästa skyddsväskan

på ett säkert sätt i exempelvis ett skärp eller ett nyckelband.

Väskan är tillverkad i polyester/tarpulin, vilket är samma slags material som används vid tillverkning av bland annat förstärkta presenningar. Alla sömmar är svetsade. Materialet är segt och tåligt och står emot väta mycket bra.

### Specifikationer

Ytermått (L x B): 180 x 110 mm

Vikt: 45 g

# Tillbehör nyckelband



## Bär din Timstock MDD runt halsen

Alla modeller av Timstock MDD har ett litet hål i ett av hörnen. Det är till för att du enkelt ska kunna fästa nyckelbandet där.

Nyckelbandet har både karbinhake och ett säkerhetsfäste i nacken.

Det har också ett snabbfäste som gör att du enkelt kan lossa den nedre delen vid behov.

**Med snabbfäste kan du enkelt frigöra den nedre delen.**



Behöver du stöd inför en utprovning?  
Kontakta oss för vägledning.



**funktionsverket**

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)