


BRUKSANVISNING

BIG Step-by-Step med nivåer

① Välj kontaktfärg

Skruva av det färgade locket moturs. Sätt på locket med den valda färgen genom att skruva medurs tills det tar stopp.

Det följer också med ett transparent lock. Placera gärna en bild eller symbol på det färgade locket och klicka över det transparenta locket.


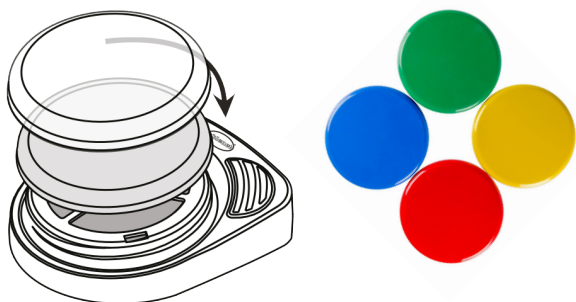


③ Produktöversikt

② Sätt i batteri och Starta


På baksidan finner du batterilock och utrymme för batteriet. Sätt i ett 9-volts batteri.

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på din BIG Step-by-Step.

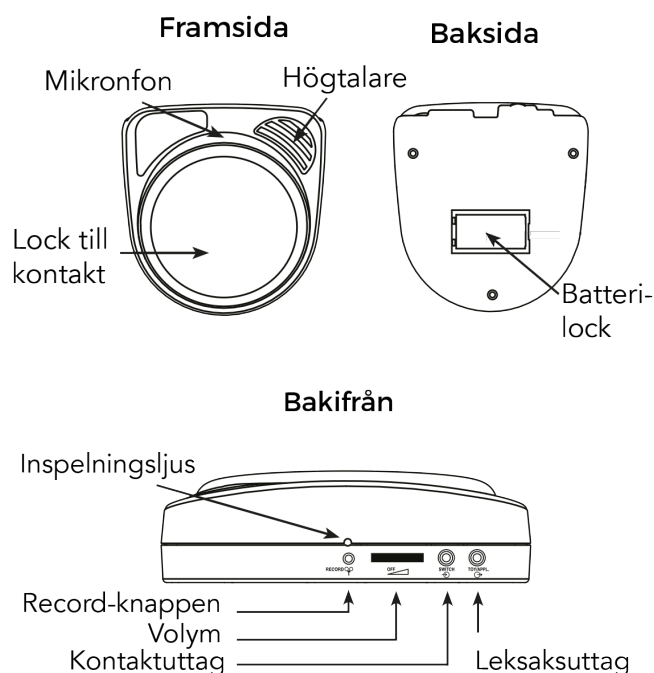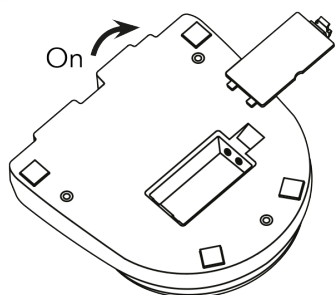

4 Inspelningsläge


Välj önskad nivå genom att använda nivåknappen på sidan av enheten (LITTLE Step-by-Step på bilden). Tryck och håll nere Record-knappen tills inspelningsljuset tänds. Då lampan tänds kan du släppa inspelningsknappen.

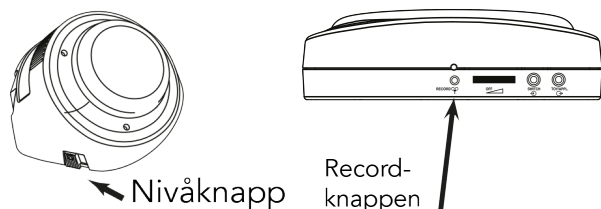

5 Spela in meddelande


Tryck och håll nere kontaktlocket. När du hör ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. Släpp när du är klar. Du kan upprepa för att spela in fler meddelande.

Inspelningsljuset kommer att blinka under inspelningen. Du har två minuter inspelningstid. Ljuset blir gult och blinkar när bara tio sekunder av tiden återstår.

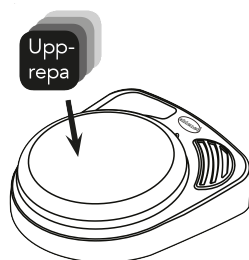

6 Gå ur inspelningsläge

Tryck ner och släpp Record-knappen för att lämna inspelningsläget.

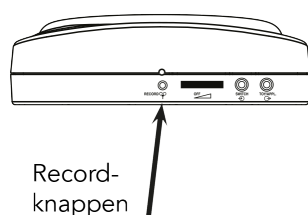


7 Upprepa ett meddelande

1. Spela det meddelande du vill upprepas.
2. Tryck på inspelningsknappen en gång efter det att meddelandet är slut. Meddelandet upprepas sedan varje gång du trycker på kontakten.
3. Om du vill fortsätta till nästa meddelande trycker du på inspelningsknappen en gång (1x).

8 Använda externa kontakter

Koppla in din 3,5mm-kontakt i ingången för kontaktuttag. BIG Step-by-Step är klar att använda!

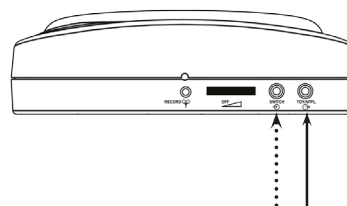


Koppla in din kontaktpassade leksak i ingången för leksaksuttag. När du använder din BIG Step-by-Step kommer leksaken att aktiveras lika lång tid som det inspelade meddelandet på din BIG Step-by-Step.

OBS! För att kunna styra en elektrisk apparat, typ leksak, krävs en PowerLink® 3. För mer information besök www.funktionsverket.se

9 Montera BIG Step-by-Step

BIG Step-by-Step kan monteras med hjälp av den stora trekantiga monteringsplattan samt en mängd andra monteringsystem.

Skruva monteringsplattan på plats med hjälp av de tre hålen.

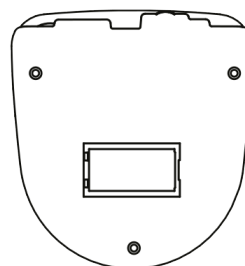

funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se