


BRUKSANVISNING

BIGmack

① Välj kontaktfärg

Skruva av det färgade locket moturs. Sätt på locket med den valda färgen genom att skriva medurs tills det tar stopp.


Det följer också med ett transparent lock. Placera gärna en bild eller symbol på det färgade locket och klicka över det transparenta locket.

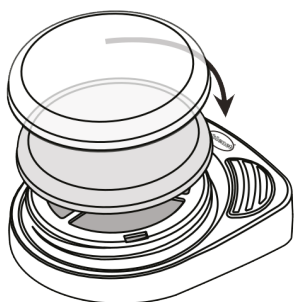


② Sätt i batteri och Starta

På baksidan finner du batterilock och utrymme för batteriet. Sätt i ett 9-volts batteri.

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på din BIGmack.

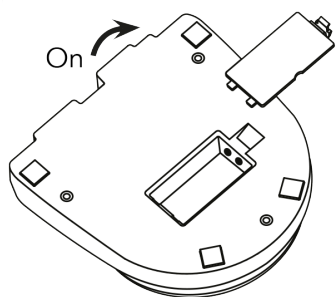


③ Produktöversikt

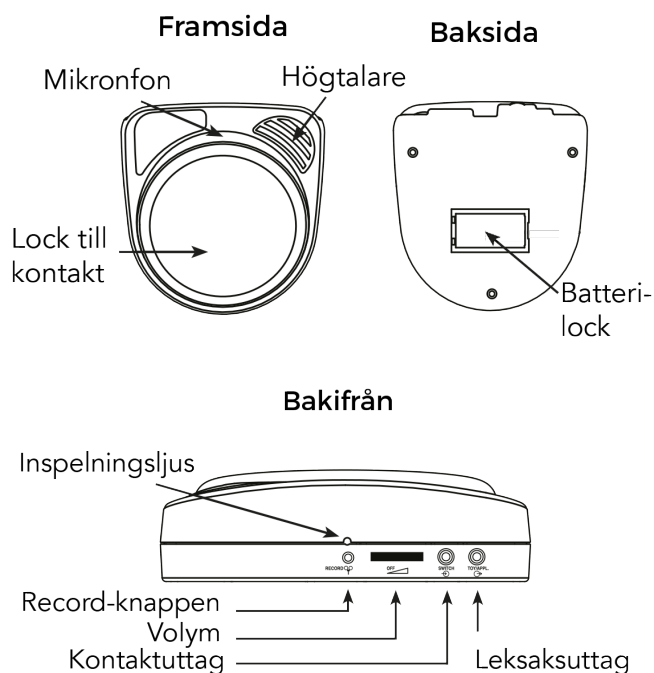

④ Inspelningsläge


Tryck och håll nere Record-knappen tills inspelningsljuset tänds. Då lampan tänds kan du släppa inspelningsknappen.

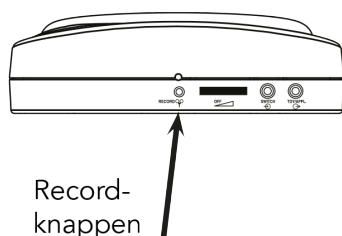

⑤ Spela in meddelande


Tryck och håll nere kontaktlocket. När du hör ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. Släpp när du är klar.

Inspelningsljuset kommer att blinka under inspelningen. Du har två minuter inspelningstid. Ljuset blir gult och blinkar när bara tio sekunder av tiden återstår.

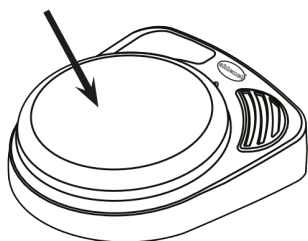


⑥ Gå ur inspelningsläge

Tryck ner och släpp Record-knappen för att lämna inspelningsläget.

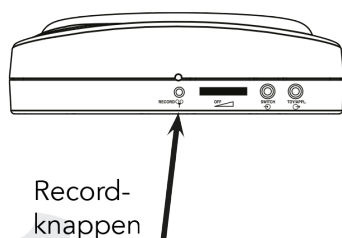

⑦ Använda externa kontakter

Koppla in din 3,5mm-kontakt i ingången för kontaktuttag. BIGmack är klar att använda!

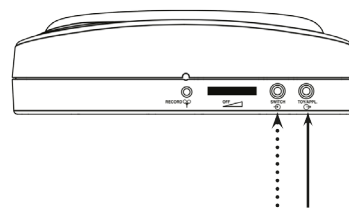


Koppla in din kontaktpassade leksak i ingången för leksaksuttag. När du använder din BIGmack kommer leksaken att aktiveras lika lång tid som det inspelade meddelandet på din BIGmack.

OBS! För att kunna styra en elektrisk apparat, typ leksak, krävs en PowerLink® 3. För mer information besök www.funktionsverket.se

⑧ Montera BIGmack

BIGmack kan monteras med hjälp av den stora trekantiga monteringsplattan samt en mängd andra monteringsystem.

Skruva monteringsplattan på plats med hjälp av de tre hålen.

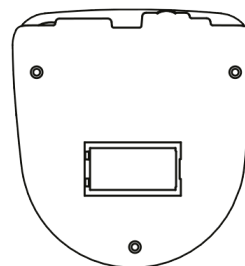

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se