

BRUKSANVISNING

Clevy Kontrast tangentbord

Clevy Kontrast tangentbord är med sina kontrastfärgade och förstörade tangenter särskilt anpassat för personer med synned-sättning, men kan även användas vid skriv-inläring och tangentbordsträning med barn.

Dess tydlighet ger fördelar inom specialpeda-gogisk undervisning och för personer som av olika orsaker kan ha svårt att hantera konven-tionella tangentbord.

① Kompatibilitet

Clevy Kontrast tangentbord fungerar med följande operativsystem/enheter:

- OS X (Mac)
- Windows (PC)
- Windows (surfplatta)
- Chromebook

② Installation

För att installera ditt Clevy Kontrast tangent-bord kopplar du in USB-kabeln i en ledig USB-port i datorn. Datorn kommer automatiskt att installera det nya tangentbordet, inga driv-rutiner eller annan programvara krävs.

Det brukar ta några sekunder efter att du har kopplat in USB-kabeln i datorn och sedan är det bara att sätta igång och skriva på ditt Clevy tangentbord.



③ Kontrastfärgade tangenter

Tangentbordet har kontrastfärgade tangenter, där bokstavstangenterna dessutom står i kon-trast mot övriga tangenter genom att deras färger är inverterade. Det skapar automatiskt tydliga referenspunkter för hjärnan.

A S Bokstavstangenterna ser ut så här

esc 1 Siffror & övriga tangenter ser ut så här

④ Stäng av tangentupprepning

Med hjälp av en liten switch på baksidan av Clevy går det att stänga av tangentupprepning. Vad det innebär är att du kan hålla en tangent nedtryckt en längre tid, men den returnerar ändå bara ett tecken på skärmen. Detta kan vara helt avgörande för att ett tangentbord skall kunna användas av personer med funk-tionsnedsättning eller motoriska svårigheter.



⑤ Använd funktionstangenter

Clevy saknar de fysiska F-tangenterna, men du har ändå möjlighet att få tillgång till deras funktioner genom att stänga av tangentupprepning, se avsnitt 4.

Gör så här:

1. Stäng av tangentupprepning, se avsnitt 4.
2. Tryck och håll nere F-tangenten samtidigt som du trycker på motsvarande siffertangent. Exempel: F + 1 = F1.

⑥ Inbyggt vätskeskydd

Clevy har ett inbyggt vätskeskydd som gör att spill på tangentbordet dräneras ut genom hål i botten av tangentbordet. Alla tangenter har en upphöjd "vall" för att motverka att spill rinner ner till den känsliga elektroniken inuti själva tangentbordet. Det bästa är dock att undvika att blöta ner Clevy.



⑦ Rengöring

Se till att ditt Clevy tangentbord är urkopplat från din dator eller surfplatta innan du rengör det.

Clevy kan rengöras med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel samt med desinfektions-sprit. Använd inte klorbaserade rengöringsmedel eller rengöringsmedel med aceton, typ T-sprit.

Låt ditt Clevy torka innan du kopplar in det till dator eller surfplatta igen.

⑧ Miljö & Hållbarhet

Clevy Kontrast tangentbord har en mekanisk konstruktion där varje tangent fäster vid en stålram. Detta ger en mycket hållbar konstruktion som klarar upp till 50 miljoner tangenttryckningar per tangent. Som jämförelse klarar de flesta vanliga tangentbord upp till 10 miljoner tangenttryckningar.

Clevy har normalt en mycket lång livslängd. När det är uttjänt ska det lämnas in för återvinning. Visste du till exempel att metaller går att återvinna hur många gånger som helst? Det är en bra anledning att låta din gamla trojänare bli återfödd in i kretsloppet! Återvinns som elavfall.

Du kan också skicka in ditt gamla Clevy tangentbord till oss på Funktionsverket så ser vi till att det återvinns på rätt sätt.

