

# Bruksanvisning iAdapter 5



## Montera din iPad i skalet

Lossa på de 12 skruvarna på baksidan av din iAdapter. De röda pilarna på bilden visar var skruvarna befinner sig. Skruvarna är fästa i höljet på ett sätt som gör att de inte lossnar helt, utan stannar i sina fästen så att du inte skall riskera att tappa bort dem.

Placera din iPad på de 8 gröna gummidistanserna inuti iAdaptern. Färgen på distanserna vittnat om vilken modell av iPad som passar i skyddet: rosa passar iPad 2/3/4, grön passar iPad Air och gul passar iPad Air 2.

Kontrollera så att reset-knappen på din iPad ligger i linje med resetknappen på iAdaptern, i enlighet med hur det ser ut på bilden till höger.

Placera överdelen av iAdapters hölje ovanpå din iPad och se till att båda delarna passar in i varandra. Samtidigt som du håller fast överdelen med underdelen, vänder du på iAdaptern och placerar den med baksidan uppåt på ett plant underlag. Skruva åt de 12 skruvarna som håller ihop höljet.

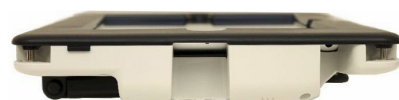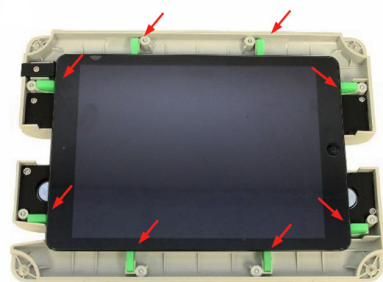


*Fortsättning på nästa sida...*

## Hur du laddar iAdapters batteri och din iPads batteri

Ladduttaget för iAdaptern är endast till för att ladda iAdapters inbyggda batteri, som används för att ge ström åt högtalarna. Du ansluter den medföljande USB-kabeln i ladduttaget som sitter på ena sidan av iAdaptern (se bild). Den andra änden ansluter du till transformator delen av laddaren. För att börja ladda din iAdapter ansluter du sedan laddaren till ett vanligt vägguttag (230V).

När din iAdapter laddas lyser en liten LED-lampa med rött sken och på själva laddaren lyser med en grön lampa för att signalera att den får ström från uttaget. När iAdapters lampor slutar lysa rött och växlar över till ett grönt sken är batteriet fulladdat. Rekommendationen är att ha PÅ/AV-switchen i läge "OFF" under tiden som laddning pågår.

Ladduttag för iPad (lightning)

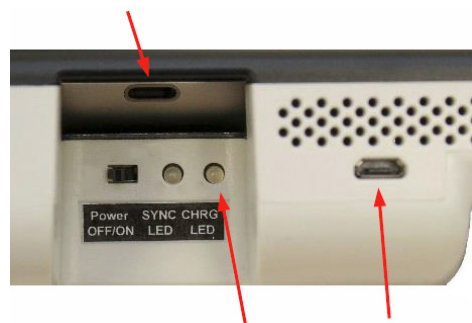

Ladd-lampa och ladduttag för iAdapter



USB-kabel

USB-laddare

## Anslut ett headset till din iPad

Hörlursingången är tillgänglig även när din iPad är monterad i iAdaptern. Anslut ditt headset direkt in i hörlursingången på din iPad, på samma sätt som om du inte hade haft den i skyddet.



Hörlursingång

**Kontakta oss om du behöver support!**