

ANVÄNDARGUIDE

Montera IntegraMouse Plus



① Sätt ihop armen

Skruva ur det lilla vredet ur SuperClamp så att Magic Arm (armen) kan fästas i hålet. Håll inne metallsplinten samtidigt som du för in armen i hålet. Släpp splinten och armen är på plats. Skruva i det lilla vredet igen så att armen sitter stadigt.



SuperClamp

Magic Arm

② Välj läge på IntegraMouse Plus

IntegraMouse Plus har tre hål, vilket möjliggör för montering i tre olika lägen.

Börja med att välja om du vill använda din IntegraMouse Plus i horisontellt eller vertikalt läge.



③ Skruva fast IntegraMouse Plus

För skruvfästet genom det hål på IntegraMouse som du har valt. Skruva fast den platta ringmuttern för att fästa IntegraMouse, som alltså ska befinna sig mellan skruvfästet och ringmuttern.



Skruva fast skruvfästet med IntegraMouse på Magic Arm. Klart!