


BRUKSANVISNING

LITTLE Step-by-Step med nivåer

① Välj kontaktfärg

Skruva av det färgade locket moturs. Sätt på locket med den valda färgen genom att skruva medurs tills det tar stopp.

Det följer också med ett transparent lock. Placera gärna en bild eller symbol på det färgade locket och klicka över det transparenta locket.

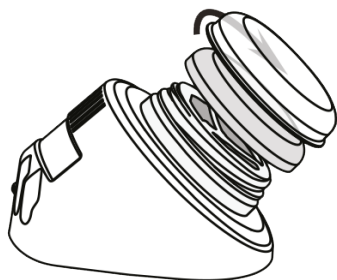


③ Produktöversikt

② Sätt i batteri och Starta

På baksidan finner du batterilock och utrymme för batteriet. Sätt i ett 9-volts batteri.


Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på din LITTLE Step-by-Step.

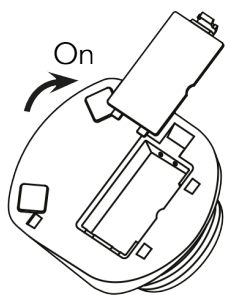


Framsida

Baksida

Lock till kontakt

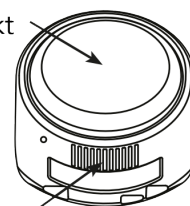


Högtalare

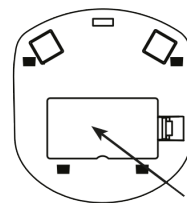


Batterilock

Bakifrån

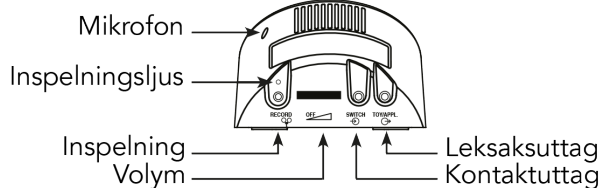

4 Inspelningsläge


Välj önskad nivå genom att använda nivåknappen på sidan av enheten. Tryck och håll nere Record-knappen tills inspelningsljuset tänds. Då lampan tänds kan du släppa inspelningsknappen.

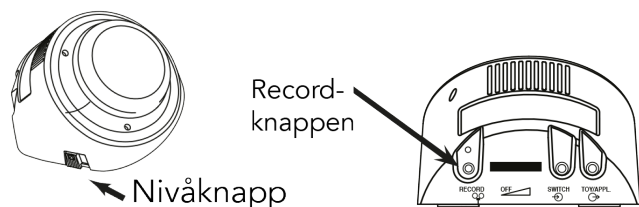

5 Spela in meddelande


Tryck och håll nere kontaktlocket. När du hör ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. Släpp när du är klar. Du kan upprepa för att spela in fler meddelande.

Inspelningsljuset kommer att blinka under inspelningen. Du har två minuter inspelningstid. Ljuset blir gult och blinkar när bara tio sekunder av tiden återstår.

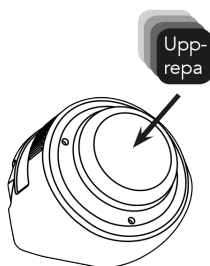

6 Gå ur inspelningsläge

Tryck ner och släpp Record-knappen för att lämna inspelningsläget.

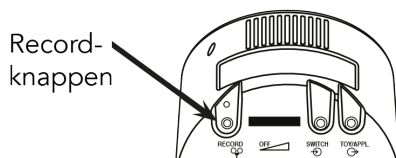


7 Upprepa ett meddelande

1. Spela det meddelande du vill upprepas.
2. Tryck på inspelningsknappen en gång efter det att meddelandet är slut. Meddelandet upprepas sedan varje gång du trycker på kontakten.
3. Om du vill fortsätta till nästa meddelande trycker du på inspelningsknappen en gång (1x).

8 Använda externa kontakter

Koppla in din 3,5mm-kontakt i ingången för kontaktuttag. LITTLE Step-by-Step är klar att använda!

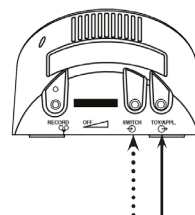

Koppla in din kontaktpassade leksak i ingången för leksaksuttag. När du använder din LITTLE Step-by-Step kommer leksaken att aktiveras lika lång tid som det inspelade meddelandet på din LITTLE Step-by-Step.

OBS! För att kunna styra en elektrisk apparat, typ leksak, krävs en PowerLink® 3. För mer information besök www.funktionsverket.se

9 Använda sockeln för montering

Frigör basen genom att trycka på fliken quick release på sockeln och skjut mot baksidan av LITTLE Step-by-Step.

Fäst basen genom att rikta in de fyra skruvhålen till motsvarande hål på LITTLE Step-by-Step. Skjut basen framåt tills det klickar.

Fig. A visar tillfällig montering.

Fig. B visar permanent montering.

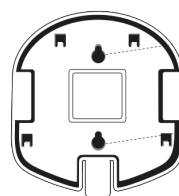


Fig. A

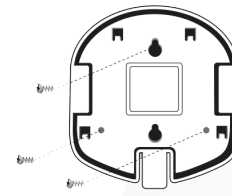


Fig. B



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se