


BRUKSANVISNING

LITTLEmack

① Välj kontaktfärg

Skruva av det färgade locket moturs. Sätt på locket med den valda färgen genom att skruva medurs tills det tar stopp.

Det följer också med ett transparent lock. Placera gärna en bild eller symbol på det färgade locket och klicka över det transparenta locket.

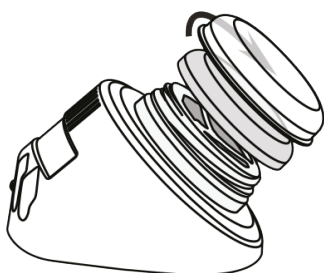


② Sätt i batteri och Starta


På baksidan finner du batterilock och utrymme för batteriet. Sätt i ett 9-volts batteri.

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på din LITTLEmack.

På LITTLEmack finns en löstagbar monteringssockeln som måste tas bort för att du ska komma åt batteriluckan. Tryck på fliken och skjut för att avlägsna sockeln.

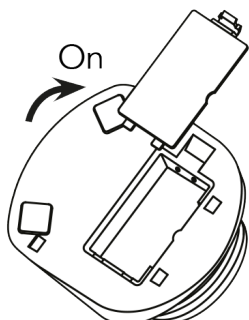


③ Produktöversikt

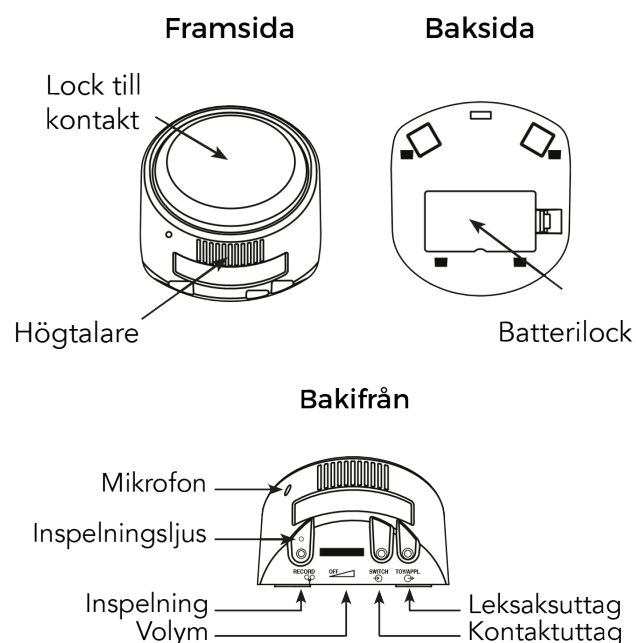

④ Inspelningsläge


Tryck och håll nere Record-knappen tills inspelningsljuset tänds. Då lampan tänds kan du släppa inspelningsknappen.

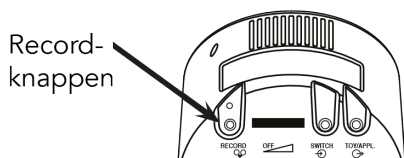

⑤ Spela in meddelande


Tryck och håll nere kontaktlocket. När du hör ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. Släpp när du är klar.

Inspelningsljuset kommer att blinka under inspelningen. Du har två minuter inspelningstid. Ljuset blir gult och blinkar när bara tio sekunder av tiden återstår.

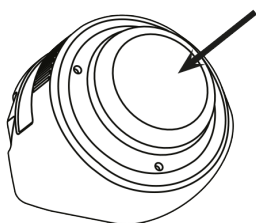


⑥ Gå ur inspelningsläge

Tryck ner och släpp Record-knappen för att lämna inspelningsläget. OBS: Denna enhet har 2 minuter av den totala inspelningstiden. Ljuset blir gul och blinkar när bara 10 sekunder av tiden återstår.

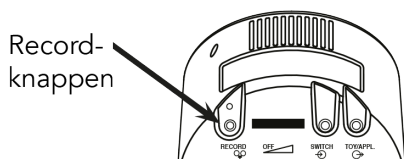

⑦ Använda externa kontakter

Koppla in din 3,5mm-kontakt i ingången för kontaktuttag. LITTLEmack är klar att använda!

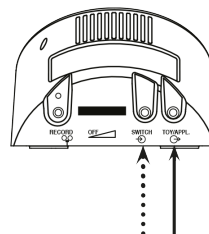

Koppla in din kontaktpassade leksak i ingången för leksaksuttag. När du använder din LITTLEmack kommer leksaken att aktiveras lika lång tid som det inspelade meddelandet på din LITTLEmack.

OBS! För att kunna styra en elektrisk apparat, typ leksak, krävs en PowerLink® 3. För mer information besök www.funktionsverket.se

⑧ Använda sockeln för montering

Frigör basen genom att trycka på fliken quick release på sockeln och skjut mot baksidan av LITTLEmack.

Fäst basen genom att rikta in de fyra skruvhålen till motsvarande hål på LITTLEmack. Skjut basen framåt tills det klickar.

Fig. A visar tillfällig montering.

Fig. B visar permanent montering.

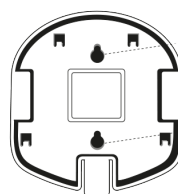


Fig. A

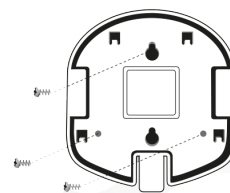


Fig. B



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se