


BRUKSANVISNING

Receive2

kontaktlåda för PC, Chromebook, Mac & Android

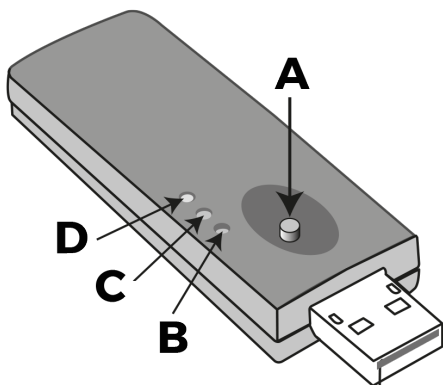

① Kompatibilitet

Receive2 är kompatibel med alla PC- och Macplattformar som är utrustade med USB-uttag och använder avancerade funktioner som inte finns tillgängliga via PS/2. Receive2 kan inte användas i PS/2-uttag ens via en adapter.

Receive2 fungerar också tillsammans med vissa surfplattor via en adapter. Den fungerar med de flesta Androidsurfplattor, men inte tillsammans med iOS-enheter.

② Installation

Se till att din dator är påslagen och igång. Anslut din Receive2 i en ledig USB-port. Receive2 känns automatiskt igen av datorn, och LED-lampan som indikerar att enheten paras tänds en kort stund. Eftersom Receive2 stödjer många olika funktioner kan denna process ta upp till en minut. Din datorn kommer troligtvis att meddela dig när det är klart.

För att optimera räckvidden för den trådlösa kopplingen är det bra att undvika att placera enheten på baksidan av datorn, nära stora metallföremål eller andra störningskällor som trådlösa hubbar, mobiltelefoner, etc.

③ Ansluta SimplyWorks®-enheter

Innan Receive2 kan användas måste den vara ansluten med de Simply Works-sändare (enheter) som du vill arbeta med. Oavsett vilken SimplyWorks-enhet det gäller så är proceduren densamma:

1. Placera sändarenheten som ska anslutas nära Receive2.
2. Tryck kort på knappen Pair (A) på din Receive2. LED-lampan (B) börjar då blinka långsamt.
3. Tryck på knappen Pair på Simply-Works-sändaren inom 10 sekunder.

4. LED-lampan (B) på Receive2 fortsätter att blinka under en kort tid medan den paras med sändaren. När processen är klar kommer lampan att lysa med ett fast sken under 5 sekunder, vilket indikerar att SimplyWorks-enheten är ansluten. Sändaren är nu färdig att använda. Så snart som en sändare framgångsrikt mottagits blinkar LED-lampan (B) kort för att ge en visuell bekräftelse på att radiolänken är i drift.

5. Om LED-lampan (B) slutar blinka efter 30 sekunder och sedan inte tänds med ett stadigt sken, upprepa processen från steg 2 ovan.

Parningsinformation från alla de enheter som anslutits lagras i det interna minnet hos din Receive2 även efter att datorn stängts av. Du kan ansluta upp till 6 olika SimplyWorks-enheter till Receive2.

④ Flera sändarenheter

Receive2 kan stödja upp till sex sändarenheter samtidigt. Du ansluter övriga sändare på samma sätt som den första.

Om du försöker ansluta en sjunde sändarenhet kommer den minst använda enhet som redan är ansluten att ersättas med den nya. Övriga fem sändarenheter förblir opåverkade.

Om du önskar starta om anslutningen vid något skede, håll in Pair-knappen (A) i ca 3 sekunder. Lampan (B) kommer då att blinka snabbt och alla sex sändningsenheter kommer att raderas från din Receive2. Du kan nu börja om anslutningsprocessen.



Kontakta oss gärna om du har frågor om SimplyWorks trådlösa system!

Exempel på trådlösa SimplyWorks-enheter som kan paras med Receive2 är SimplyWorks kontakter (finns som 125mm och 75mm), SimplyWorks Joystick och Trackball:



⑤ Caps Lock och Dra-Släpp

På framsidan av Receive2 finns en lysdiod för Dra-Släpp (C) och en för Caps Lock (D).

Detta är mycket användbart om flera brukare samtidigt använder mus- och tangetbordsfunktioner.

⑥ Miljöinformation

Om Receive2 inte fungerar, felsök den gärna. Se mer information på www.funktionsverket.se

Visste du att metaller går att återvinna hur många gånger som helst? Det är en bra anledning att låta din gamla trotjänare bli återfödd in i kretsloppet! Återvinns som elavfall. Du kan också skicka in din gamla Receive2 till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se