

Bruksanvisning till Proloquo4Text

Version 3.5

www.assistiveware.com © 2018 Alla rättigheter förbehålls.



# Proloquo4Text™

*Skriv. Tala. Kommunícera.*





<b>1. Introduktion till Proloquo4Text</b> .....	3	<b>9. Alternativ: Utseende</b> .....	15
Introduktion		Hantera snabblocken	
Anteckningar		Anpassa förutsägelsernas utseende	
Flera språk		<b>10. Alternativ: Språk och tal</b> .....	16
Få åtkomst till bruksanvisningen i appen		Välja röster	
<b>2. Startguide</b> .....	5	Hantera språk	
Konfiguration		Styra uppspelningen	
Skapa en användare		Läsa upp snabblocksobjekt	
Lägga till flera användare eller röster		<b>11. Alternativ: Förutsägelse</b> .....	17
<b>3. Gränssnittet</b> .....	6	Ordförutsägelse	
De huvudsakliga elementen i gränssnittet		Meningsförutsägelse	
Växla mellan snabblock		Utöka förkortning	
Skillnader mellan iPad och iPhone		<b>12. Alternativ: Begränsningar</b> .....	18
Kommunicera		Begränsa redigering och delning	
Anpassa		Ställa in delning	
<b>4. Snabblocken</b> .....	8	<b>13. Alternativ: Sekretess</b> .....	19
Snabblock		Privat användning	
Fraser		Rensa historik och logg	
Snabbtal		<b>14. Alternativ: Säkerhetskopiering</b> .....	20
Historik		Därför är det viktigt att säkerhetskopiera	
Konversationer		Göra en säkerhetskopia	
Ordförutsägelse		Exportera en säkerhetskopia	
Meningsförutsägelse		Importera en säkerhetskopia	
<b>5. Redigeringsläge</b> .....	10	Återställa en säkerhetskopia	
Funktioner i redigeringsläge		Ytterligare instruktioner	
Redigera objekt		<b>15. Alternativ: Låsalternativ</b> .....	21
Flytta objekt mellan kategorier		Låsalternativ	
Dölja objekt		<b>16. Alternativ: Om, Support och Nyheter</b> .....	22
Ändra egenskaper		Om och Support	
iPhone		Sammanhangsberoende hjälp	
<b>6. Använda ett externt tangentbord</b> .....	12	Nyheter	
Förändringar i användargränssnittet		Kontaktinformation för Proloquo4Text	
Kortkommandon		Proloquo4Text-resurser	
<b>7. Alternativ</b> .....	13	Proloquo4Text-videor	
Användaralternativ			
Allmänna alternativ			
<b>8. Alternativ: Skapa en ny användare</b> .....	14		
Flera användare			
Skapa användare			
Växla användare			
Ta bort användare			



## 1. Introduktion till Proloquo4Text

### INTRODUKTION

Proloquo4Text™ är en textbaserad app för alternativ och kompletterande kommunikation (AAC) som är avsedd för personer med talsvårigheter.

Proloquo4Text är utformad för snabb och flexibel textbaserad kommunikation och har stöd för flerspråkiga användare


### ANTECKNINGAR

**Anteckningar** (1) är navet i Proloquo4Text. Med hjälp av tangentbordet skriver du det du vill säga i Anteckningar. Med **Ordförutsägelse** (2) och **Meningsförutsägelse** (3) kommunicerar du enklare. Med


**Snabblock** får du åtkomst till en rad underlättande funktioner. Använd **Historik** när du vill säga något igen utan att behöva skriva om det. Spara meningar du använder ofta i **Fraser** (5) så att du snabbt kommer åt dem. Använd **Snabbtal** (4) när du vill göra snabba inlägg. Med **Konversationer** växlar du enkelt mellan konversationer.

### FLERA SPRÅK

Om du talar flera språk och använder flera iOS-tangentbord ändrar Proloquo4Text automatiskt språkinställningen för ordförutsägelse, fraser och annat innehåll när du växlar mellan tangentborden. ►

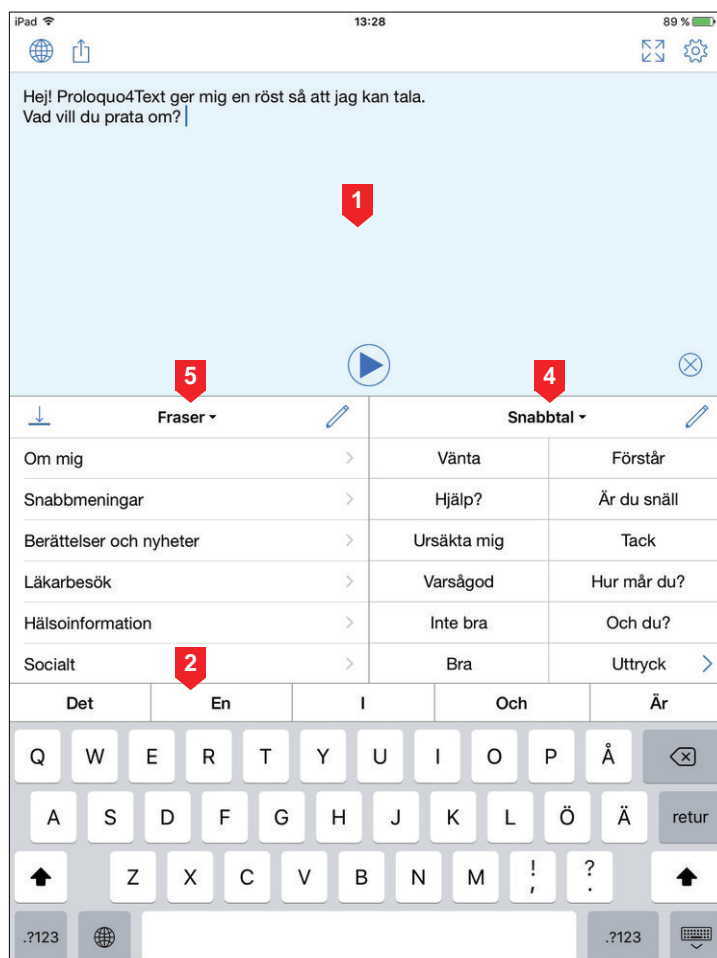

iPad

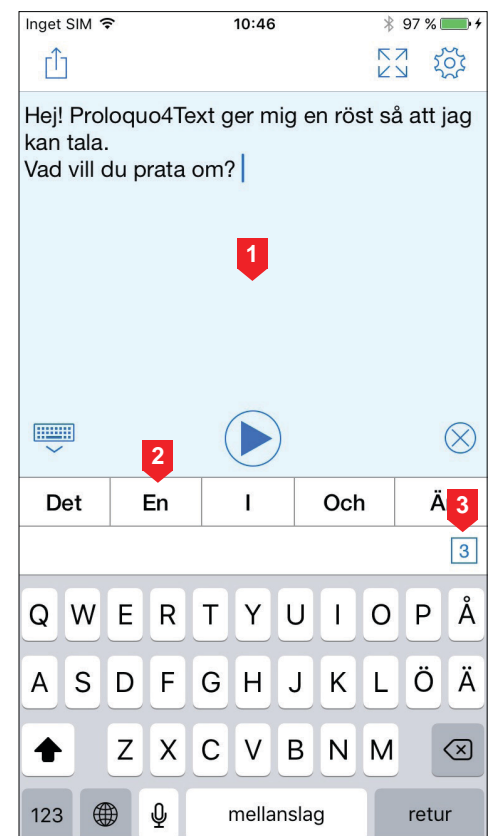

iPhone




Om du föredrar att använda ett iOS-tangentbord för alla språk du talar ställer du in språken manuellt under Alternativ. Då visas en symbol för **Språkval** (1) så att du kan växla mellan språken.

Läs mer om hur du använder och ställer in Proloquo4Text i den här bruksanvisningen.

## FÅ ÅTKOMST TILL BRUKSANVISNINGEN I APPEN

Du kommer åt bruksanvisningen genom att öppna **Alternativ** (2) och sedan välja **Support** och **Bruksanvisning**.

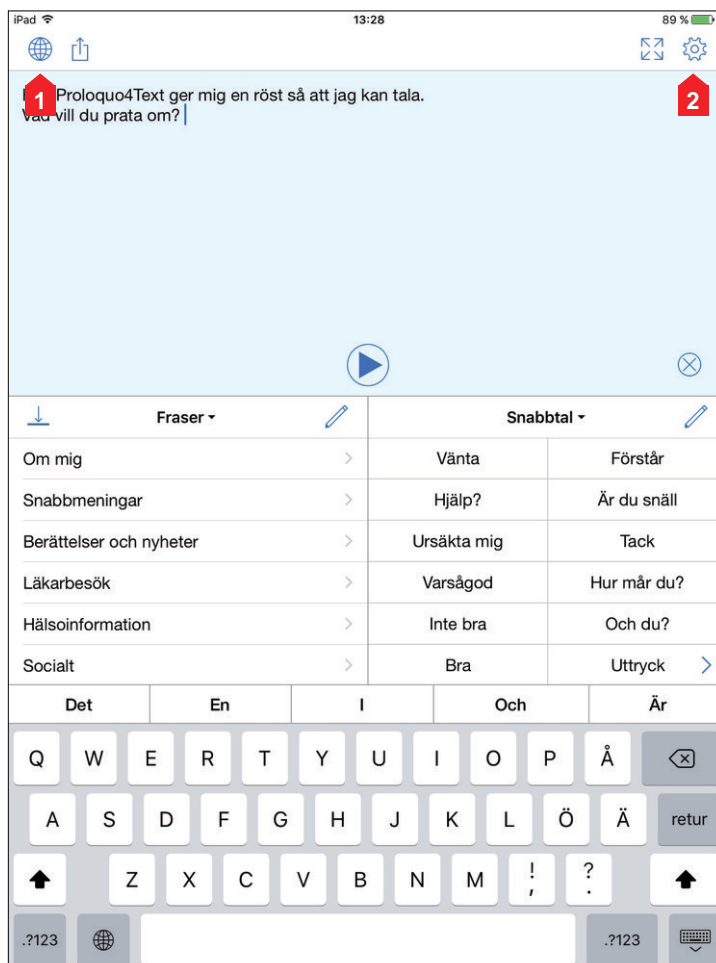



## 2. Startguide

### KONFIGURATION



Första gången du startar Proloquo4Text blir du guidad genom konfigurationen.

### SKAPA EN ANVÄNDARE

Ange namnet på användaren (1) och tryck **Nästa** (2). Välj sedan en **Röst** (3) som hämtas när du är klar med guiden och tryck **Nästa** (4). Medan din valda röst hämtas används en ersättningsröst av lägre kvalitet. På så sätt kan du börja kommunicera på en gång.

### LÄGGA TILL FLERA ANVÄNDARE ELLER RÖSTER

Efter den första installationen går du till alternativmenyn i Proloquo4Text om du vill skapa fler användare eller lägga till fler språk och röster (kan hämtas gratis).

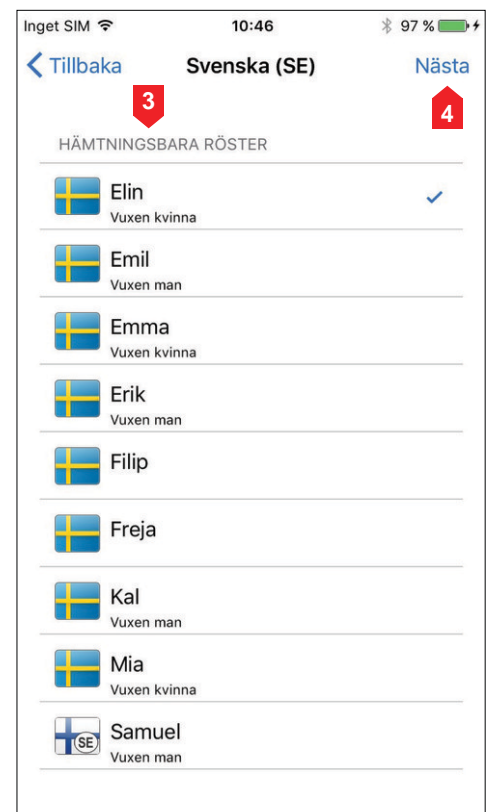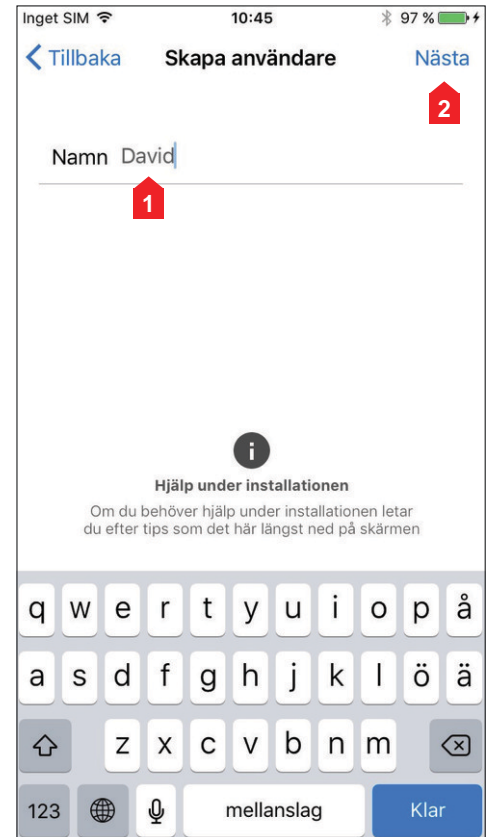



## 3. Gränssnittet

### DE HUVUDSAKLIGA ELEMENTEN I GRÄNSSNITTET


Med Proloquo4Text uttrycker du dig enkelt och effektivt. Börja skriva genom att trycka **Anteckningar**. Använd skärmtangentbordet med den avancerade och självlärande funktionen PolyPredix™ för **Ordförutsägelse** eller ett Bluetooth-tangentbord.

Med **Snabblock** kommer du snabbt åt de anpassningsbara kategorierna **Fraser** (för meningar du använder ofta), **Snabbtal** (för snabba inlägg), **Konversationer** (för att växla mellan konversationer), **Meningsförutsägelse**, **Ordförutsägelse** och **Historik**.

Under **Alternativ** anger du vilka **Snabblock** du vill använda och var de ska visas, samt anpassar färger, teckensnitt och mycket mer.

### VÄXLA MELLAN SNABBLOCK

Du kan växla mellan olika **Snabbblock** genom att trycka på **Snabblockets** rubrik. Om du håller kvar fingret visas en pop-up-lista över **Snabbblock** och du kan direkt växla till ett visst **Snabbblock**. Du kan tillfälligt dölja eller visa ett **Snabbblock** genom att trycka på visningssymbolen.

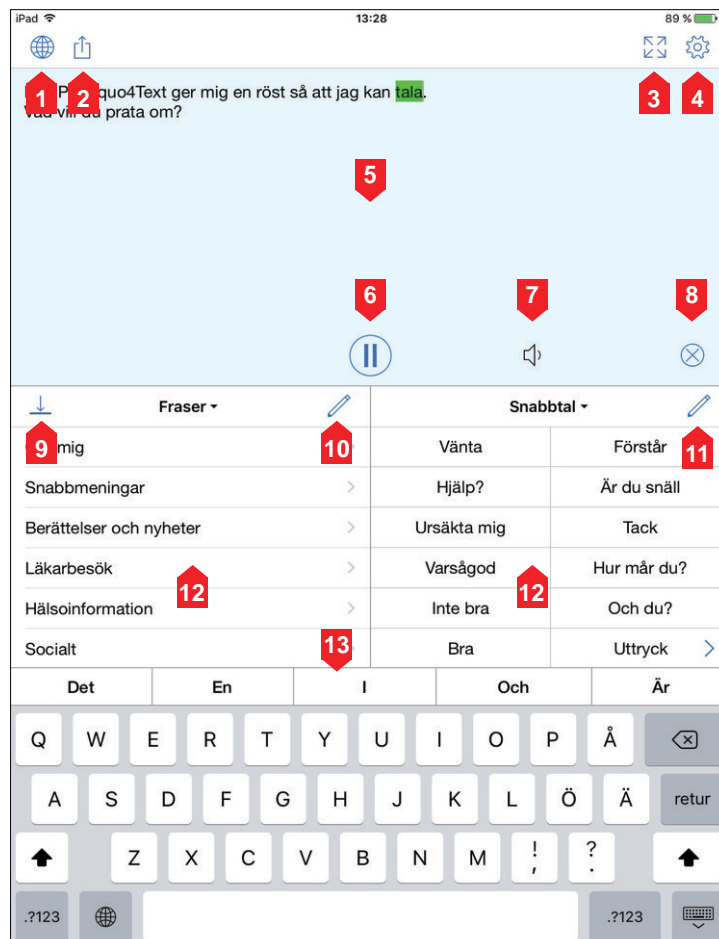

1. Språkval\*
2. Dela
3. Helskärm
4. Alternativ
5. Anmärkningar
6. Spela upp/pausa
7. Ljudindikator
8. Rensa anteckningar
9. Växla mellan visning av snabbblock
10. Lägg till en konversation
11. Redigera ett snabbblock
12. Snabbblock
13. Ordförutsägelse

\*Språkvalet visas bara när Hantera språk är inställt på Manuellt. Mer information finns i kapitel 10.



## SKILLNADER MELLAN IPAD OCH IPHONE

På iPhone-versionen kommer du åt **Snabblock** genom att dölja tangentbordet med symbolen **Visa/dölj tangentbord** (1) längst ned i Anteckningar. I iPad-versionen är **Meningsförutsägelse** ett **Snabblock** men i iPhone-versionen kommer du åt meningsförutsägelsen genom att trycka på den lilla rutan (2) som visar antalet matchande meningar på andra raden för **Ordförutsägelse**.



## KOMMUNICERA

Antingen kan texten läsas upp medan du skriver eller så trycker du **Spela upp** när du har skrivit klart (konfigurera beteendet med **Alternativ**). Med symbolen **Dela** delar du texten via e-post, meddelanden, Twitter och Urklipp.

Om du vill kommunicera ljudlöst trycker du på symbolen **Helskärm** (3), så visas innehållet i Anteckningar i helskärmsläge. I helskärmsläge använder du symbolen **Vänd** (4) så att texten blir lättläst för samtalspartnern som sitter mittemot dig.

## ANPASSA

Tryck på **Redigera**-symbolen när du vill redigera innehåll i **Fraser** och **Snabbtal** eller ta bort vissa poster i **Historik**.

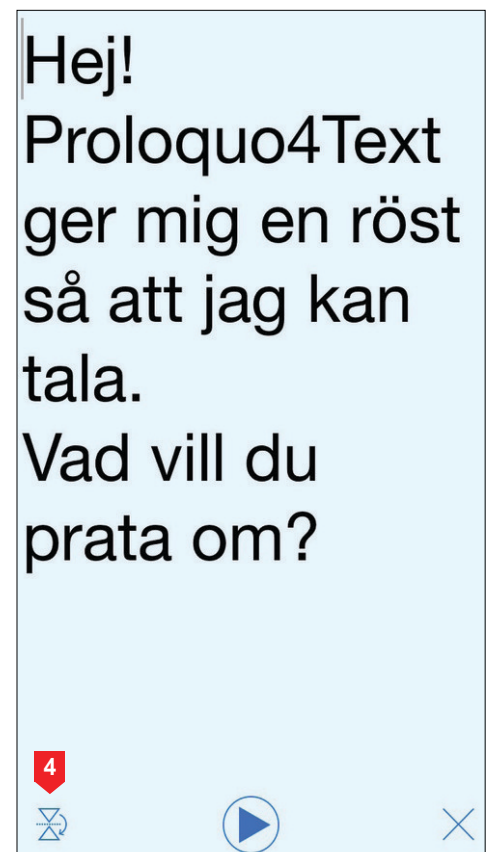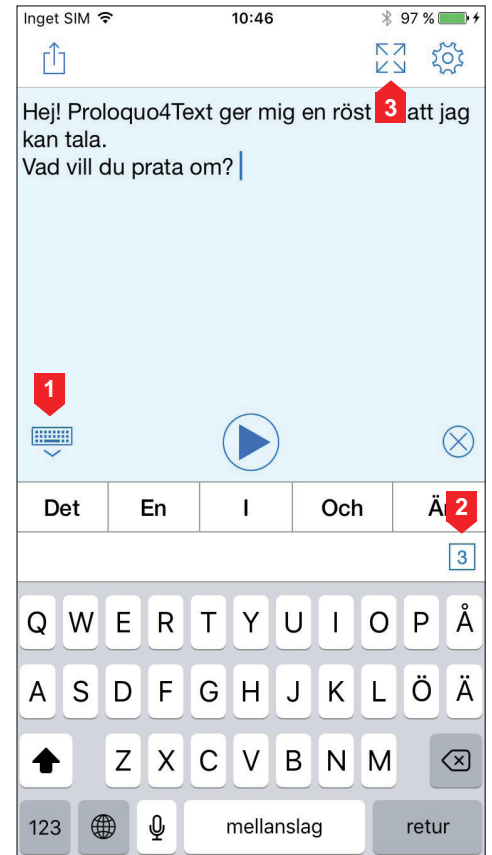





## 4. Snabblocken

### SNABBLOCK

Dessa sex **Snabblock** underlättar konversationen: **Fraser**, **Snabbtal**, **Konversationer**, **Historik**, **Ordförutsägelse** och **Meningsförutsägelse**.

De två sista finns inte som Snabblock på iPhone eftersom de redan är integrerade i fältet Ordförutsägelse.

### FRASER

Med **Fraser** sparar du vanliga fraser eller stycken. Lägg till en ny fras i den aktuella kategorin genom att markera text i Anteckningar och trycka Skapa fras i redigeringsmenyn. Eller så redigerar du fraser eller lägger till eller tar bort fraser genom att trycka på Redigera-symbolen i navigeringsfältet. Du kan ordna innehållet i kategorier. Du kan även tilldela förkortningar till varje objekt

så att du sedan bara behöver skriva förkortningen när du infogar den texten i Anteckningar. Som standard infogas texten i Anteckningar om du trycker på en fras och talas direkt om du håller kvar fingret på frasen. Du kan ändra beteendet i avsnittet **Talobjekt** under **Språk och tal**.

### SNABB TAL

Med **Snabbtal** får du snabb åtkomst till inlägg och uttryck under konversationen. Som standard läses ett objekt upp direkt utan att infogas i Anteckningar om du trycker **Snabbtal**. På så sätt kan du kommentera snabbt utan att avbryta texten du arbetar på i Anteckningar. Som standard infogas texten i Anteckningar om du håller kvar fingret på den. Du kan ändra beteendet i avsnittet **Talobjekt** under **Språk och tal**.

Fraser ▾	
Om mig >	
Snabbmeningar >	
Berättelser och nyheter >	
Läkarbesök >	
Hälsoinformation >	
Socialt >	

Snabbtal ▾		
Vänta	Förstår	
Hjälp?	Är du snäll	
Ursäkta mig	Tack	
Varsågod	Hur mår du?	
Inte bra	Och du?	
Bra	Uttryck >	

Konversationer ▾	
Hej! Proloquo4Text ger mig en röst...	

Historik ▾	
Senaste 15 minuterna	
Hej! Proloquo4Text ger mig en röst så att...	

Ordförutsägelse ▾
Samtal
Samtala
Samtalade
Samtalar
Samtalet
Samtalsämne

Meningsförutsägelse ▾
Berätta vad du gör.
Det gör ont när jag
Det har blivit bättre.
Det har blivit värre.
Det kan vänta.
Det kommer och går.





## HISTORIK

Med **Historik** kan du säga något du sagt tidigare. Texten infogas i Anteckningar om du trycker på den och läses upp direkt om du håller kvar fingret på den. Du kan ändra beteendet i avsnittet **Talobjekt** under **Språk och tal**. Tänk på att text läggs till historiken när du använder Spela upp. Om du sveper ner i historiken visas ett sökfält så att du kan söka efter en specifik text.

## KONVERSATIONER

Med **Konversationer** växlar du enkelt mellan två eller flera konversationer. På så sätt kan du till exempel svara på en fråga i en annan konversation utan att avbryta det du skriver i den första konversationen.

## ORDFÖRUTSÄGELSE

Med **Ordförutsägelse** skriver du snabbare. Systemet lär sig automatiskt nya ord och ordkombinationer. Det innebär att det även lär sig stavfel men om du inte upprepar samma stavfel tar systemet automatiskt bort stavfelet efter ett tag. I avsnittet **Förutsägelse** under alternativ kan du konfigurera systemet och till exempel begränsa inläringen till rättstavade ord.

## MENINGSFÖRUTSÄGELSE

Med **Meningsförutsägelse** får du snabb åtkomst till de mest använda meningarna som börjar med den text du har skrivit. **Meningsförutsägelse** innehåller de meningar du nyligen skrivit och dina fraser.



## 5. Redigeringsläge


### FUNKTIONER I REDIGERINGSLÄGE

Om du vill redigera objekt i Fraser eller Snabbtal trycker du på **Redigera**-symbolen så öppnas redigeringsläget. I redigeringsläget kan du **lägga till** nya kategorier och objekt, **klippa ut**, **kopiera**, **klistra in** och **ta bort** innehåll och redigera befintligt innehåll. När du vill lämna redigeringsläget trycker du **Klar** i skärmens övre högra hörn. Om inte alternativet **Klar** visas är du i Markeringsläge och måste först trycka **Klar** i skärmens nedre vänstra hörn. På iPhone måste du först använda bakåtknappen för att gå tillbaka till listan med objekt. Obs! Du kan skapa objekt snabbt genom att kopiera en lista med meningar (en mening per rad) från en

annan app och sedan trycka **Lägg till** i redigeringsläget.

### REDIGERA OBJEKT

Om du vill redigera ett enstaka objekt markerar du det. Du kan redigera flera objekt samtidigt genom att trycka **Markera** och sedan på de objekt du vill redigera. Om du vill ändra ordningen på objekt trycker du först **Markera**, sedan på de tre linjerna bredvid objektet du vill flytta. Därefter drar du objektet till den nya platsen.

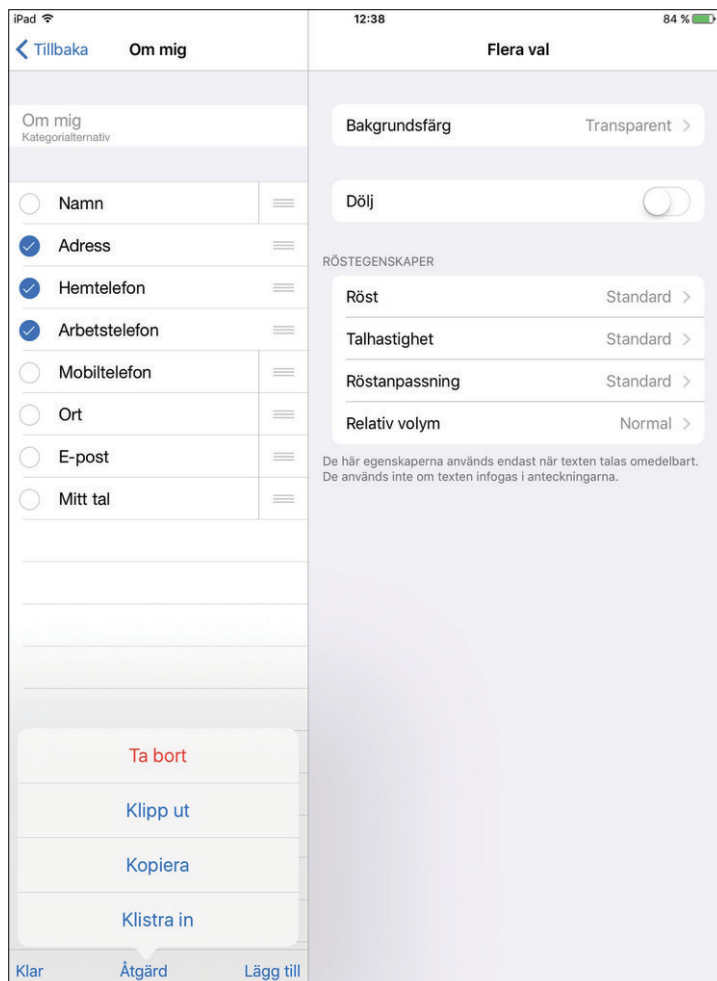



## FLYTTA OBJEKT MELLAN KATEGORIER

Om du vill flytta objekt från en kategori till en annan trycker du **Markera** och sedan på de objekt du vill flytta. Tryck **Åtgärd** och välj **Klipp ut**. Bläddra sedan till den nya kategorin, tryck **Åtgärd** och välj **Klistra in**.

## DÖLJA OBJEKT


Du kan ange att vissa kategorier eller objekt ska vara **Dolda** om du inte vill att de ska visas vid normal användning. Obs! Dolda objekt kan fortfarande användas med funktionen Utöka förkortning.

## ÄNDRA EGENSKAPER

Du kan också ändra utseende och röstegenskaper för ett objekt. Obs! Röstegenskaper gäller bara för text som läses upp direkt istället för att infogas i Anteckningar.

## IPHONE

På iPhone har du åtkomst till samma redigeringsfunktioner som på iPad. Den största skillnaden är att Objekt eller Kategorier inte visas på samma skärm som Egenskaper.

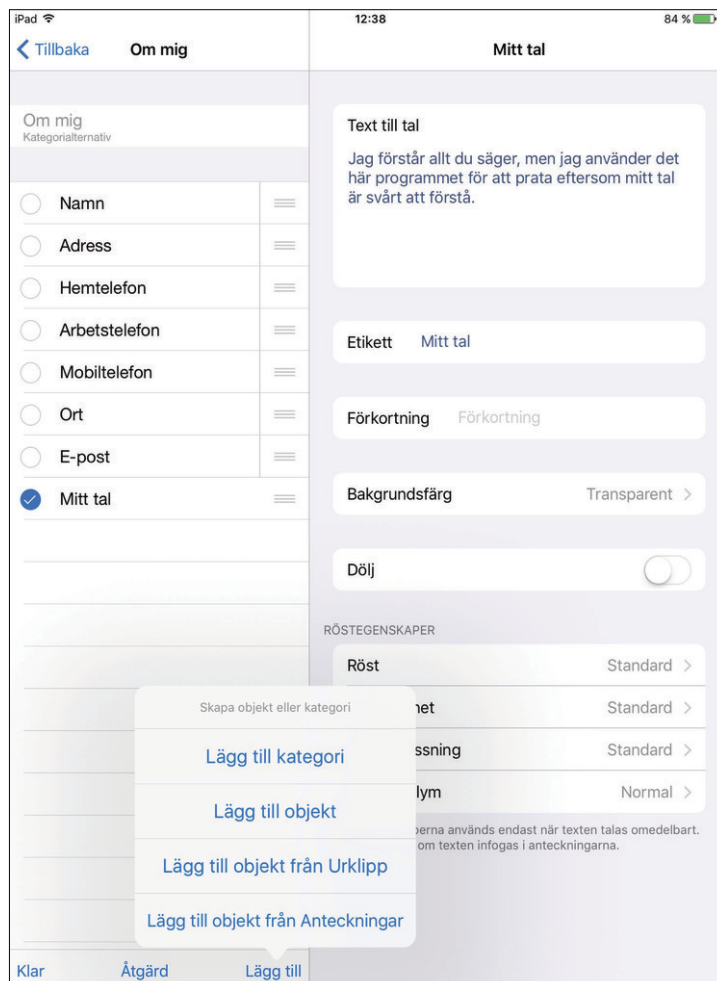




## 6. Använda ett externt tangentbord

### FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

När du ansluter ett tangentbord eller ett Bluetooth-tangentbord försvinner skärmtangentbordet. Fältet för ordförutsägelse visas fortfarande om du inte har inaktiverat funktionen. Längst ner till höger på varje förutsägelse visas en siffra som motsvarar den sifvertangent på tangentbordet du kan använda om du vill markera förutsägelsen. Om du vill växla mellan att skriva siffror och att använda sifvertangenterna för att markera förutsägelser trycker du på symbolen **Sifferväxling** (1) till höger i fältet.

### KORTKOMMANDON

Med Kommando-Retur spelar du upp eller pausar tal, med Kommando-K rensar du Anteckningar och med Kommando-0 växlar du mellan att markera ordförutsägelser och att skriva siffror. Dessutom är alla externa standardkortkommandon för iOS tillgängliga.

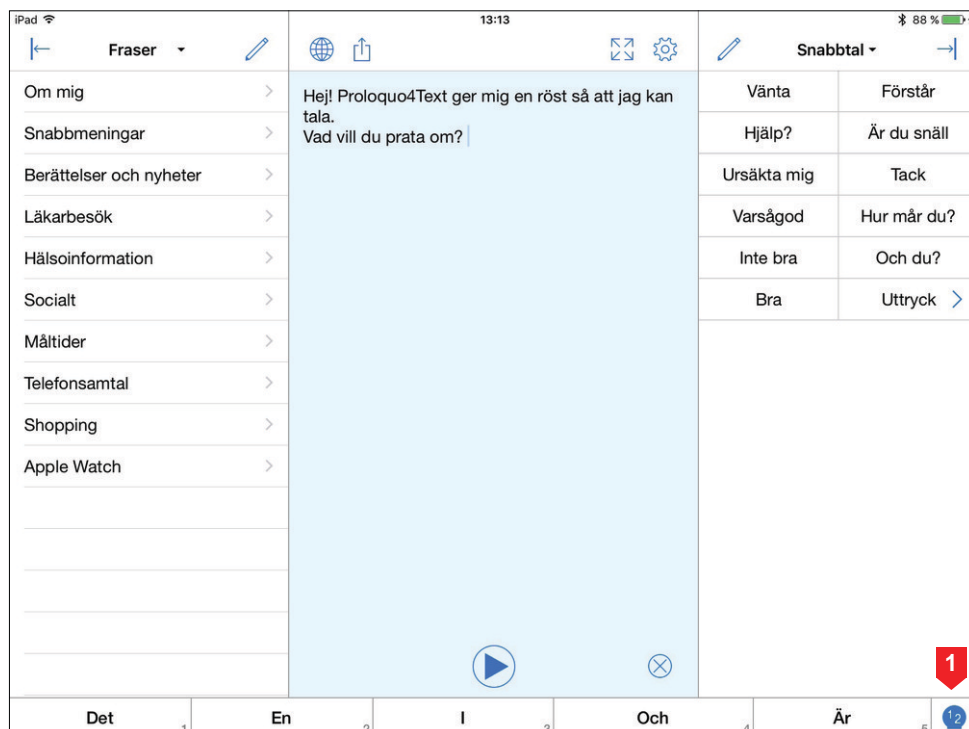




## 7. Alternativ

### ANVÄNDARALTERNATIV

Öppna **Alternativ** genom att trycka på kugghjulssymbolen. I **Alternativ** kan du skapa ytterligare **Användare**, konfigurera **utseendet** i Proloquo4Text, konfigurera **Språk och tal** och anpassa **Förutsägelse**. Under **Begränsningar** kan du begränsa åtkomsten till vissa funktioner och det finns också ett avsnitt där du kan ställa in **Sekretess**.

### ALLMÄNNA ALTERNATIV

Det finns också ett antal allmänna alternativ som gäller för alla användare, bland annat **Säkerhetskopior**, **Låsalternativ** (ange ett lösenord så att en elev eller ett barn inte kan ändra inställningarna), **Om** (läs mer om Proloquo4Text), **Support** (hitta bruksanvisningen i appen, upptäck utbildningsresurser eller kontakta supporten) och **Nyheter** (uppdateringar från AssistiveWare).

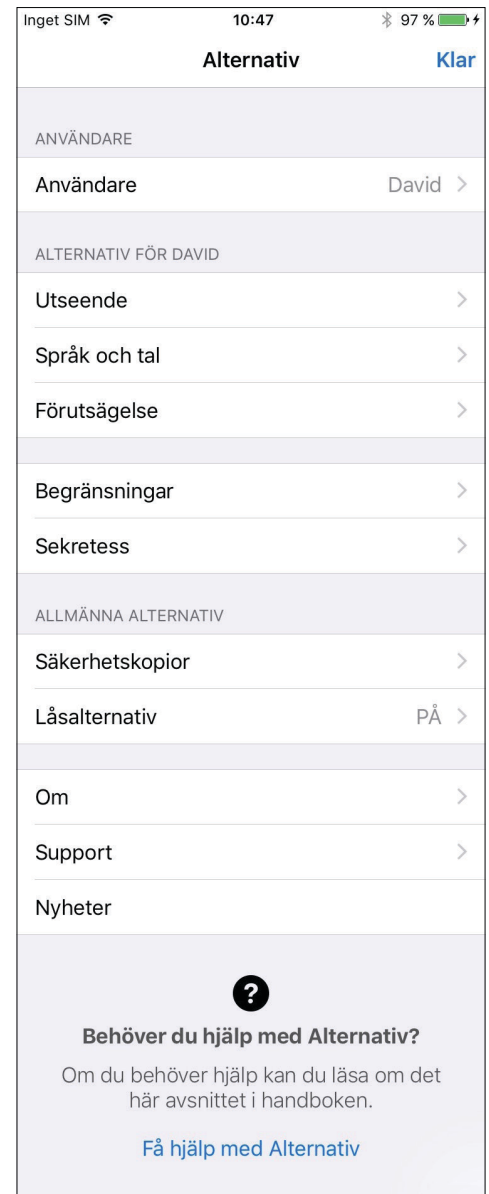



## 8. Alternativ: Skapa en ny användare

### FLERA ANVÄNDARE

I avsnittet **Användare** under alternativ kan du skapa flera användarkonfigurationer.

Varje användare kan ha sina egna inställningar för röst, utseende, osv. Detta kan vara användbart i klassrummet där en enhet delas av flera elever men det kan också vara praktiskt för en talpedagog som använder Proloquo4Text med personer med mycket olika behov.

### SKAPA ANVÄNDARE


Om du trycker **Ny användare** (1) skapas en helt ny användare baserad på standardinställningar och om du trycker **Duplicera befintlig användare** (2) baseras den nya användaren på en befintlig användare.

### VÄXLA ANVÄNDARE

Om du vill växla mellan användare är det bara att trycka på namnet på den användare som du vill växla till.

### TA BORT ANVÄNDARE

Du kan ta bort användare genom att trycka **Redigera** (3) och ta bort de användare du inte längre behöver. Obs! Du kan aldrig ta bort den aktuella användaren.

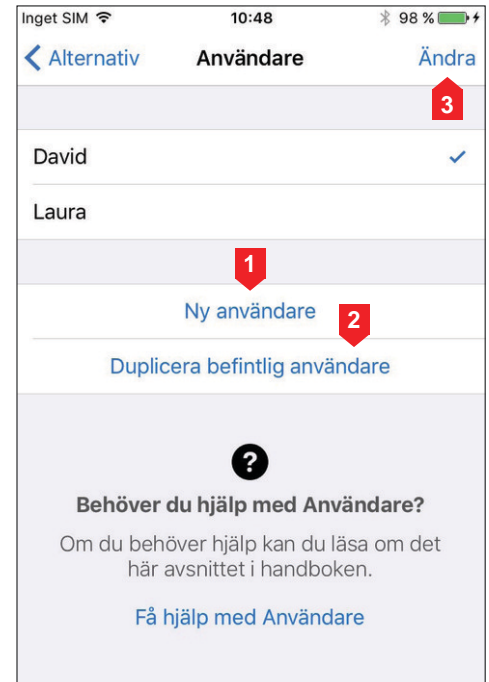



## 9. Alternativ: Utseende

### HANTERA SNABBLOCKEN

I avsnittet **Utseende** under Alternativ kan du ställa in storleken på symbolerna, utseendet på **Anteckningar** och **Snabblock**. För vart och ett av snabblocken kan du välja om det ska **visas** eller **döljas** och i iPad-versionen kan du välja om det ska visas till vänster eller höger på skärmen. Du kan välja att ha alla snabblock på samma sida så att du får mer utrymme för dina Anmärkningar eller att dölja dem helt och istället utnyttja helskränsläget.

### ANPASSA FÖRUTSÄGELSERNAS UTSEENDE

Du kan visa eller dölja fältet för **Tangentbordsförutsägelse** och anpassa **teckensnittet**.

The screenshot shows the 'Alternativ Utseende' settings menu. It is organized into several sections:

- Stora ikoner:** A toggle switch is currently turned off.
- ANTECKNINGAR:**
  - Typsnitt: HelveticaNeue, 18 pt >
  - Helskräm: 52 pt >
  - Bakgrundsfärg: Himmelsblå >
  - Kontroller: Nederkant >
  - Talindikator: Visa vid tal >
- SNABBLOCK:**
  - Fraser: PÅ >
  - Snabbtal: PÅ >
  - Konversationer: PÅ >
  - Historik: PÅ >
  - Ordförutsägelse: PÅ >
  - Meningsförutsägelse: PÅ >
- Tangentbordsförutsägelse:**
  - Ordförutsägelse: A toggle switch is currently turned on.
  - Typsnitt: HelveticaNeue-Medium, 18 pt >

At the bottom, a note states: 'De här alternativen används endast för David.'





## 10. Alternativ: Språk och tal

### VÄLJA RÖSTER

I avsnittet **Språk och tal** i Alternativ väljer du en eller flera röster som du vill använda för varje **aktivt språk**.

### HANTERA SPRÅK


Ställ in **Hantera språk** på **Automatiskt** om du vill att de tillgängliga språken ska baseras på vilka iOS-tangentbord du har aktiva (som du har valt i enhetens Inställningar). Ställ in språkhanteringen på **Manuellt** om du hellre använder ett tangentbord för alla språk och vill välja vilka språk som ska stödas bland de som Proloquo4Text har röster för.

### STYRA UPPSPELNINGEN

I Anteckningar kan du styra hur texten läses upp medan du skriver och när du trycker Spela upp. Aktivera **Identifiera språk automatiskt** om det finns flera aktiva språk och du vill att Proloquo4Text automatiskt ska gissa vilket språk och vilken röst som ska användas när text som består av meningar på olika språk läses upp.

### LÄSA UPP SNABBLOCKSOBJEKT

Under **Snabblock** kan du avgöra om ett objekt ska läsas upp direkt eller infogas i Anteckningar när du **trycker** eller **håller kvar fingret** på det.

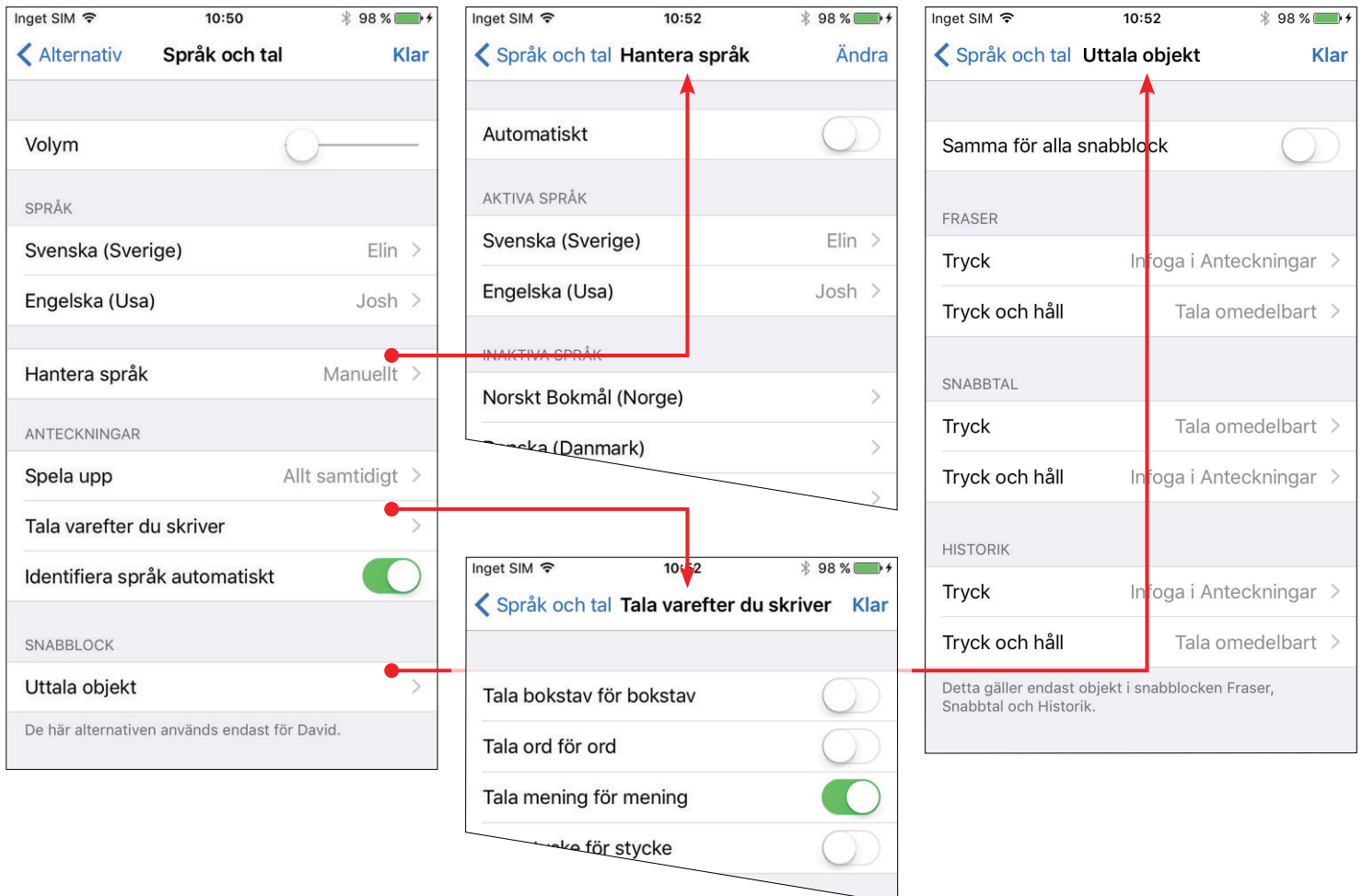



## 11. Alternativ: Förutsägelse

### ORDFÖRUTSÄGELSE

Inaktivera **Automatiskt avstånd** om du inte vill ha något automatiskt mellanslag efter att du valt ett förslag. Inaktivera **Flerordsförutsägelse** om du vill att förslagen endast ska bestå av ett ord, dvs. inte flera ord som "hjälp mig".

Ställ in **Inläring** på **Rättstavade ord** om du vill att Proloquo4Text bara ska lära sig ord som finns i den inbyggda Apple-ordlistan. Du kan också inaktivera inlärningsfunktionen helt. Ordförutsägelse fungerar förstås mycket bättre om du låter Proloquo4Text lära sig **Alla ord** men för personer som har svårt att stava rätt kan det vara lämpligt att bara tillåta inläring av rättstavade ord. Observera att du inte kan ta bort felstavade ord manuellt. Men inlärd ord som inte används tillräckligt ofta tas automatiskt bort efter en stund.

Med de andra förslagsalternativen kan du ange hur många förslag som ska ges och hur de ska ordnas.

### MENINGSFÖRUTSÄGELSE

Ange maximalt antal förslag och deras ordning.

### UTÖKA FÖRKORTNING

Genom att trycka **Utöka** ställer du in vad som ska aktivera funktionen Utöka förkortning.





## 12. Alternativ: Begränsningar

### BEGRÄNSA REDIGERING OCH DELNING

På sidan Begränsningar kan du inaktivera alternativen **Tillåt redigering** av objekt i **Fraser** och **Snabbtal** och **Tillåt delning** av text i Anteckningar genom e-post, Meddelanden och Twitter.

Obs! Om du vill vara säker på att användaren inte "upphäver" dessa begränsningar kan du använda funktionen Låsalternativ (behandlas i kapitel 15) och lösenordsskydda alternativen.

### STÄLLA IN DELNING

Obs! Om du vill använda e-post, Meddelanden och Twitter måste du konfigurera konton för dessa tjänster i enhetsinställningarna.






## 13. Alternativ: Sekretess

### PRIVAT ANVÄNDNING

Aktivera **Privat användning** om du vill ha en helt privat konversation där Proloquo4Text inte sparar något du skriver. Detta medför mindre effektiva förslag men samtidigt kan du vara säker på att ingen annan som får åtkomst till appen kan se vad du sagt.

### RENSA HISTORIK OCH LOGG

Med **Rensa historik** och **Rensa meningslogg** kan du radera tidigare sparad information. Förutsägelsefunktionen påverkas betydligt av att du rensar meningsloggen men inte av att du rensar historiken.

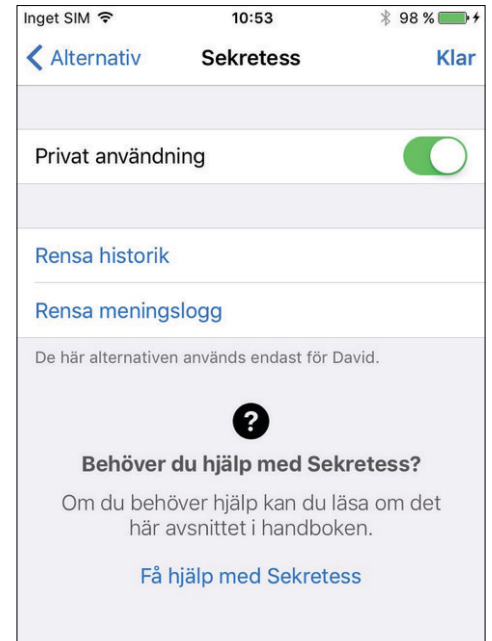



## 14. Alternativ: Säkerhetskopiering

### DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SÄKERHETSKOPIERA

Det är viktigt att regelbundet göra säkerhetskopior som förvaras utanför enheten. Du kan överföra säkerhetskopiorna till datorn med iTunes fildelning eller använda det inbyggda stödet för Dropbox. Du kan överföra säkerhetskopior från datorn eller Dropbox till en annan enhet eller mejla dem till någon annan.

### GÖRA EN SÄKERHETSKOPIA

Om du trycker **Säkerhetskopiera** [användarnamn] nu säkerhetskopieras data från den aktuella användaren och om du trycker **Säkerhetskopiera alla användare nu** säkerhetskopieras data från alla Proloquo4Text-användare. Då skapas interna säkerhetskopior. Genom att regelbundet exportera dina säkerhetskopior till iTunes eller Dropbox kan du vara säker på att du inte förlorar dina anpassningar.

### EXPORTERA EN SÄKERHETSKOPIA

Om du vill exportera en säkerhetskopia till iTunes eller Dropbox trycker du **Exportera säkerhetskopior**.

### IMPORTERA EN SÄKERHETSKOPIA

Om du vill importera en säkerhetskopia från iTunes trycker du **Importera säkerhetskopior**. Importera en säkerhetskopia från Dropbox genom att öppna .p4tbk-filen i Dropbox-appen.

### ÅTERSTÄLLA EN SÄKERHETSKOPIA

Om du vill återställa en befintlig säkerhetskopia använder du **Återställ från säkerhetskopia**.



### YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

Mer information finns på:


[www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources](http://www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources)



## 15. Alternativ: Låsalternativ

### LÅSALTERNATIV

Aktivera alternativet **Lås** om du vill begränsa åtkomsten till **Alternativ** med hjälp av ett lösenord och förhindra att en användare gör oavsiktliga ändringar. När **Lås** är aktiverat måste du ange rätt lösenord om du vill komma åt **Alternativ** i Proloquo4Text. Om du inte kommer ihåg lösenordet kontaktar du [proloquo4text@assistiveware.com](mailto:proloquo4text@assistiveware.com) så får du hjälp.

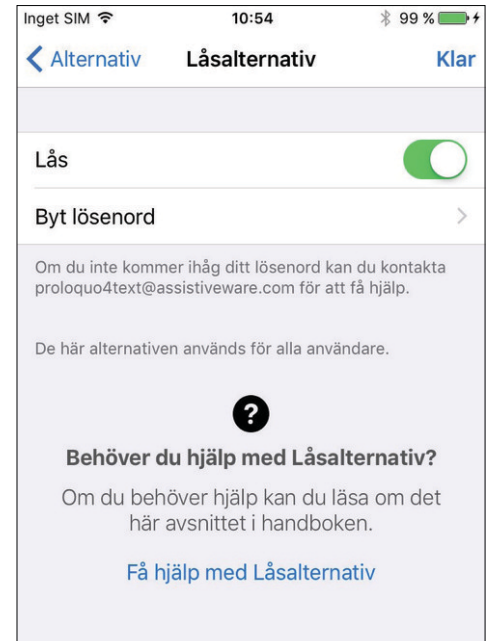



## 16. Alternativ: Om, Support och Nyheter

### OM OCH SUPPORT


Du kan läsa mer om Proloquo4Text med alternativen **Om** och **Support**. Under **Om** kan du se vilken version av appen du har installerat. Under **Support** hittar du länkar till support- och forumresurser på webbplatsen. Från avsnittet **Support** når du även den här bruksanvisningen.

### SAMMANHANGSBEROENDE HJÄLP

På de flesta sidor i **Alternativ** finns en länk till information om det aktuella alternativet längst ned på skärmen.

### NYHETER

I avsnittet **Nyheter** hittar du de senaste nyheterna om Proloquo4Text och relaterade ämnen.

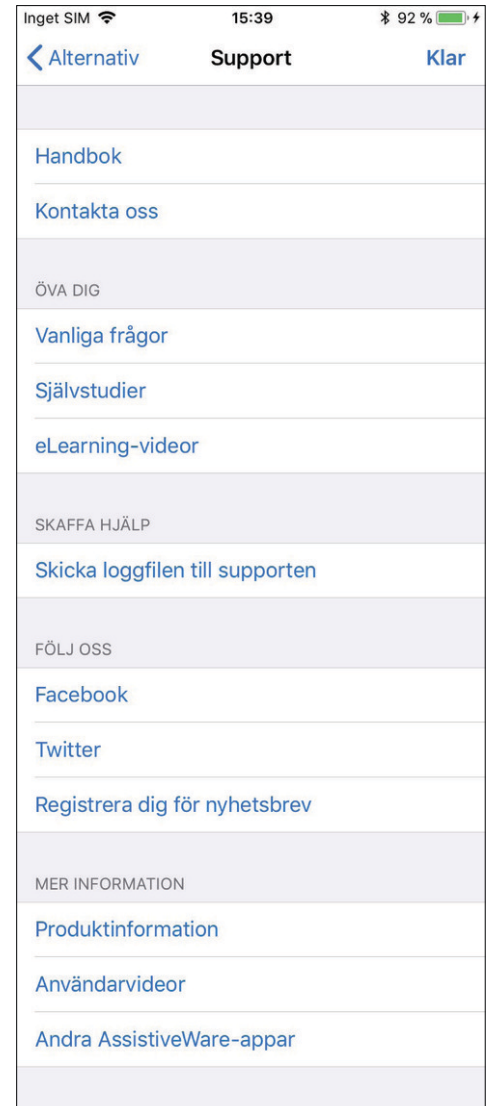



# Bruksanvisning till Proloquo4Text

## Version 3.5

### KONTAKTINFORMATION FÖR PROLOQUO4TEXT

[support@assistiveware.com](mailto:support@assistiveware.com)

### PROLOQUO4TEXT-RESURSER

[www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources](http://www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources)

### PROLOQUO4TEXT-VIDEOR

[www.assistiveware.com/e-learning-videos](http://www.assistiveware.com/e-learning-videos)

Proloquo4Text är ett registrerat varumärke som tillhör AssistiveWare B.V. AssistiveWare är ett varunamn och registrerat varumärke som tillhör AssistiveWare B.V. i USA och andra länder. Proloquo4Text app och bruksanvisning © 2018 AssistiveWare®. Alla rättigheter förbehålls.

AssistiveWare  
Laurierstraat 193  
1016 PL Amsterdam  
Nederländerna  
fax: +31-20-6128266  
[www.assistiveware.com](http://www.assistiveware.com)