


BRUKSANVISNING

Byte av membran

IntegraMouse Plus

① Ta av munstycket korrekt

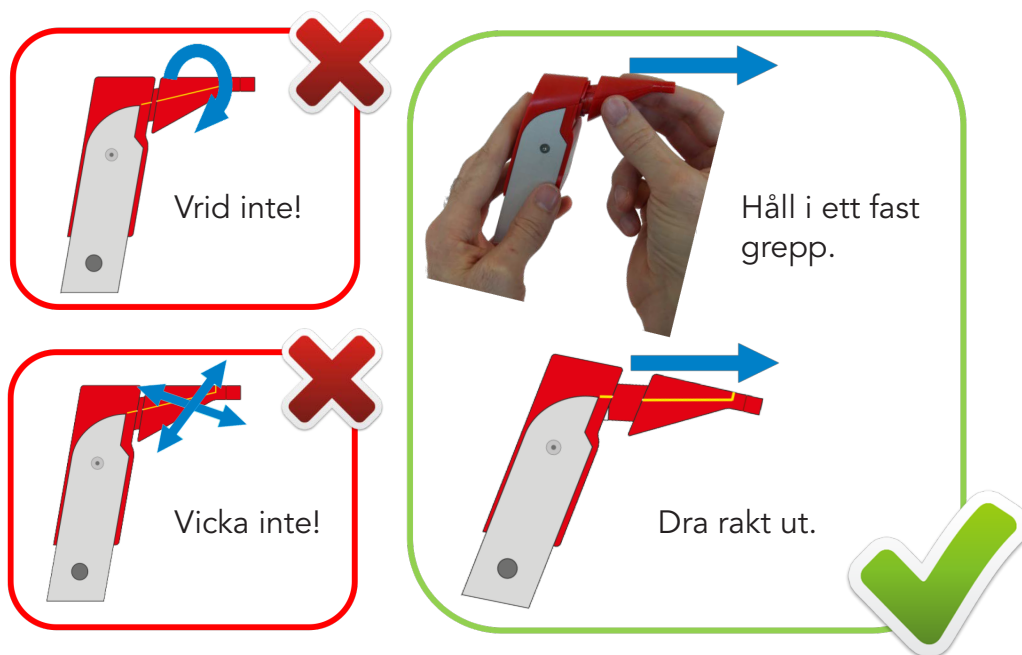

② Avlägsna membranet

Avlägsna membranet med ett lätt tryck.



③ Rengör munstycket


För vägledning i hur du rengör munstycket, se dokumentet Rengöring eller avsnitt 9.1 i Bruksanvisningen till IntegraMouse Plus.

④ Sätt på nytt membran


Då munstycket är rent och torrt sätt på membranet på munstycket. Se till att membranet täcker munstyckets öppning så att inga glipor eller andra skevheter förekommer.



⑤ Sätt på munstycket

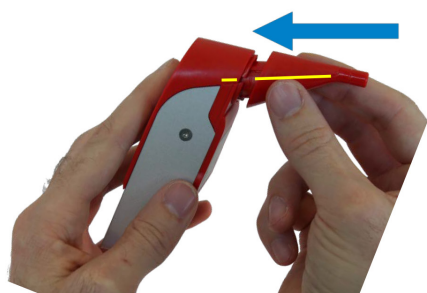

Håll IntegraMouse Plus i ett fast grepp.

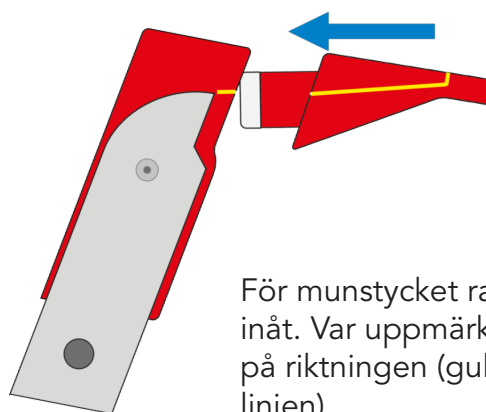

För munstycket rakt inåt. Var uppmärksam på riktningen (gula linjen).

⑥ Klart!



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se