


BRUKSANVISNING

Monteringssats


för samtalsapparater & kontakter

Monteringssatsen innehåller ett antal olika fästen fungerar som monteringsfästen för AbleNets produktsortiment av kontakter och samtalsapparater.


Kontakta gärna oss på Funktionsverket om du önskar vägledning! Ring 031-75 77 950 eller maila info@funktionsverket.se

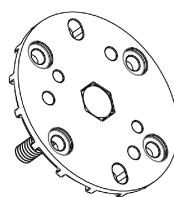


Gängad rund platta

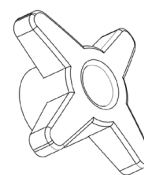


Låsvred

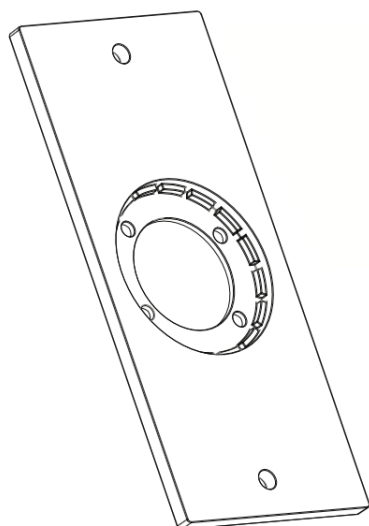


Stor rektangulär adapter

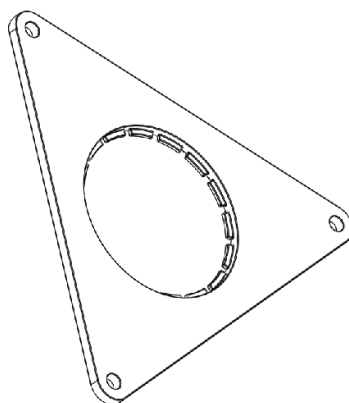


Stor triangeladapter

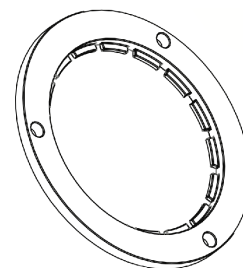


Ringadapter

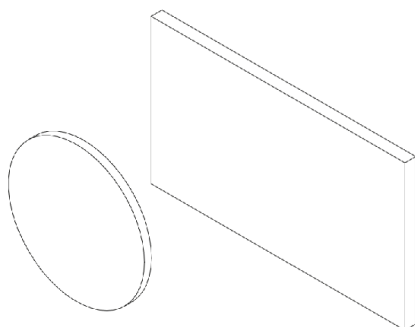


Kardborrband

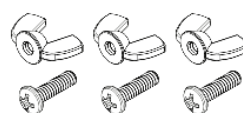


Skrusats grön påse

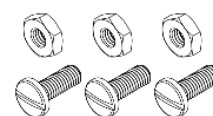

Skrusats gul påse

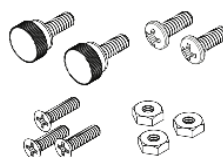


Skrusats blå påse

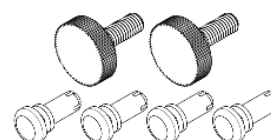

Skrusats röd påse

① Monteringsalternativ 1

1. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
2. Skruva på låsvredet på den runda plattan.
3. Fäst plattan på monteringsarmen .
4. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

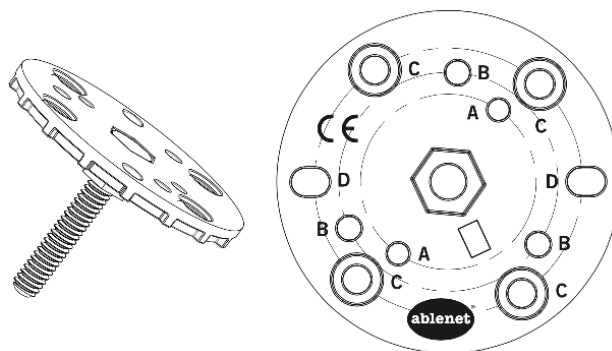



Produkt	Monteringsmönster	Skravar
- Buddy Button - Big Buddy	A	Skruvar från blåa påsen
Specs Switch	B	Skruvar från blåa påsen
- Jelly Beamer Twist - QuickTalker 1	D	Skruvar från blåa påsen



② Monteringsalternativ 2

1. Sätt den gängade runda plattan i ringadaptern.
2. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
3. Skruva på låsvredet på den runda plattan.
4. Fäst plattan på monteringsarmen.
5. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

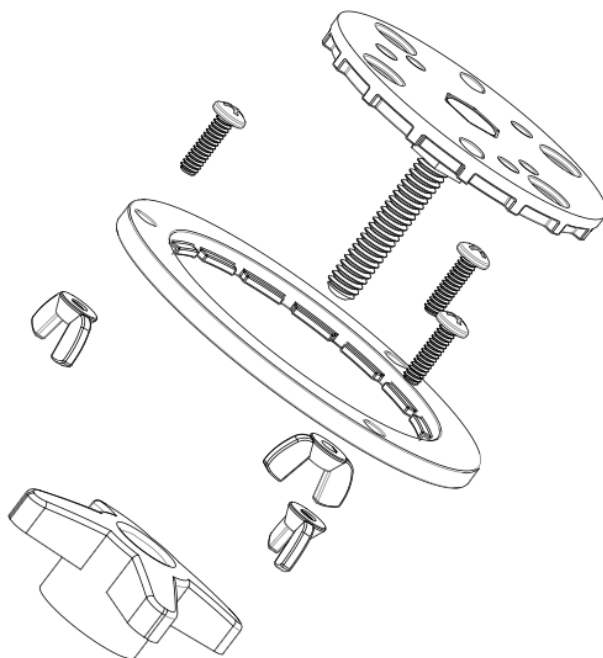

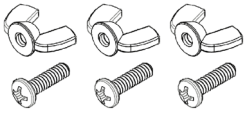Produkt	Monteringsmönster	Skrugar
• Jelly Bean Twist • LITTLEmack • LITTLE Step-by-Step • LITTLE Step-by-Step med nivåer • LITTLE Step-by-Step Choice med nivåer • LITTLE Step-by-Step GamePlay • iTalk 2 • iTalk 2 med nivåer	N/A	Skrugar från gröna påsen 




3 Monteringsalternativ 3



1. Sätt den gängade runda plattan i den stora triangeladaptern.

2. Fäst plattan till enheten med skruvarna.

3. Skruva på låsvredet på den runda plattan.

4. Fäst plattan på monteringsarmen.

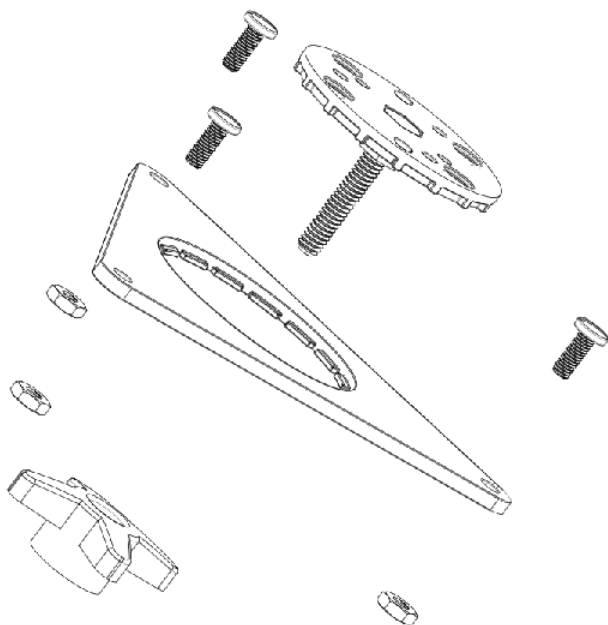

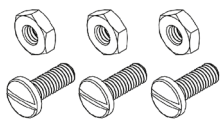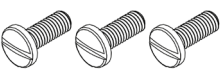Produkt	Monteringsmönster	Skrugar
• Big Red • Big Beamer	N/A	Skrugar från gula påsen 
• BIGmack • BIG Step-by-Step • BIG Step-by-Step med nivåer • BIG Step-by-Step Coice med nivåer • BIG Step-by-Step GamePlay	N/A	Skrugar från gula påsen 



4 Monteringsalternativ 4

1. Sätt den gängade runda plattan i den stora rektangeladaptern. Rikta hålen märkta C på den gängade runda plattan till de fyra hålen på den stora rektangulära adaptern. Den tryckta texten på den gängade runda plattan ska vara läsbar när du håller den stora rektangulära adaptern horisontellt, se exempel.


2. Sätt fyra låstappar från den röda påsen i hålen märkta C på den gängade runda plattan. Låstapparna kan tas bort om det behövs.

3. Fäst plattan till enheten med skruvarna.


4. Skruva på låsvredet på den runda plattan.

5. Fäst plattan på monteringsarmen.

6. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

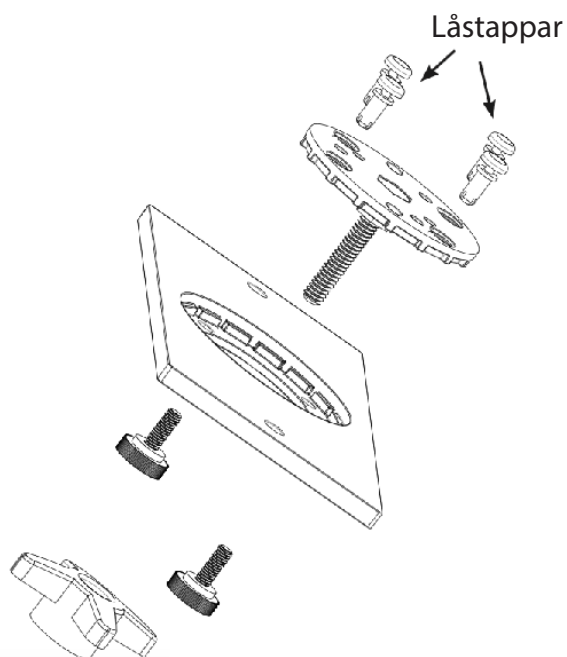

Exempel på steg 1

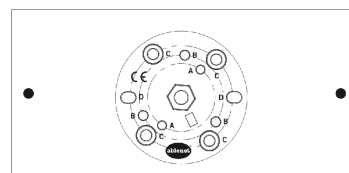

Produkt	Monteringsmönster	Skrugar
- Connect - FL4SH	N/A	Skruvar från röda påsen
- SuperTalker - QuickTalker - Relax - Mini Relax	N/A	Fästes med kardborrband. Skruvar från röda påsen



⑤ Monteringsarmar

Det finns flera alternativ till monteringsarmar att montera fästet på. Här ser du några alternativ:



Manfrotto Magic Arm med stor friktionsratt med SuperClamp



Manfrotto Flexarm HD svanhals 55 cm med SuperClamp

Kontakta gärna oss för att få råd och vägledning kring hur du bäst monterar dina hjälpmedel!



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se