

## BRUKSANVISNING

# Hållare för iPad 2/3/4 med dubbelt sugkoppssystem

### 1 Om hållaren


Denna hållare är avsedd för att montera iPad 2/3/4 utan skydd, men kan även användas för andra modeller. Se specifikationer för vilka mått som gäller.

Hållaren levereras vanligtvis färdigmonterad, men kan av emballageskäl vara uppdelad i två eller tre delar. Använd i så fall vreden för att öppna armens ändrar och fäst dessa vid respektive kuller, varefter du skruvar åt vredet igen.



### 2 Hur du fäster din iPad i hållaren

Hållarens kåpor hålls ihop av en fjädermekanism och kan dras isär från varandra. Det enklaste sättet att montera din surfplatta är att trä in plattans överdel i den övre kåpan och försiktigt pressa kåpan uppåt, i riktning bort från den nedre kåpan.

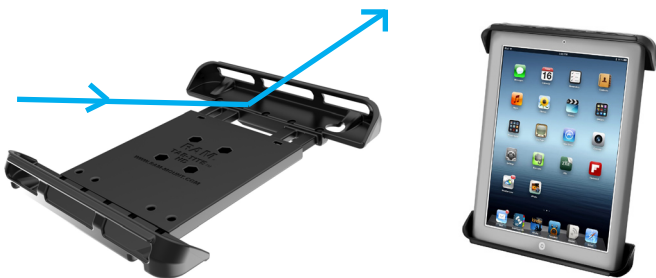

När du har tryckt upp den övre kåpan kan du lätt "glida in" surfplattan i den nedre kåpan. Släpp sedan försiktigt så kommer den övre kåpan automatiskt dra sig tillbaka mot mitten och fixera surfplattan mellan båda kåporna!

### 3 Specifikationer

<b>Vikt</b>	816 gram
<b>Material</b>	Pulverlackerad aluminium Förstärkt kompositplast

Mått för kompatibla surfplattor:

<b>Höjd:</b>	8,5" – 11,125"
<b>Bredd:</b>	6,38" – 7,75"
<b>Tjocklek:</b>	0,13" – 0,56" (" = 1 tum = ca. 2,54 cm)



**funktionsverket**

Tel: 031-75 77 950

E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)

Webb: [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)

## BRUKSANVISNING

# Hållare för iPad 2/3/4 med dubbelt sugkoppssystem

### 4 Hur du använder sugkoppssystemet

Sugkoppssystemet är avsett för användning på släta, icke-porösa underlag som t.ex. glas, metall eller en slät bordsskiva. Du öppnar vardera sugkopp genom att vrida på dess "spak" i mitten (se bilden till höger).

I öppet läge skall sugkopparna pressas mot underlaget. Vrid sedan tillbaka sugkopparnas spakar. Om du gjort rätt skall det märkas att fästet "suger åt" mot underlaget. Prova att försöka lyfta hållaren. Om den sitter fast är monteringen korrekt.

När du vill lossa på sugkopparna igen så skall du *alltid* och *endast* använda den lilla fliken på respektive sugkoppssystem. Då släpper trycket direkt, utan ansträngning.

*OBS! Försök aldrig slita bort hållaren med kraft - detta skadar sugkopparna och kan i värsta fall förstöra fästet!*

### 5 Hur du justerar hållarens arm

Denna hållare levereras med en 9 cm lång justerbar arm. Genom att skruva på vredet på mitten av armen öppnas lederna och du kan då justera hållaren fritt i 360°.

Börja med att vrida vredet motsols för att lossa på lederna. Böj sedan armen till önskvärt läge och vrid vredet medsols för att fixera armen igen.

*OBS! Skruva aldrig hårdare än vad som behövs för att armen skall vara stilla i sin position.*



Flik för att lossa på trycket

Spak för att dra åt sugkoppssystemet

### 6 Skötselråd / rekonditionering

Du kan rengöra din hållare med en lätt fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel, eller en rengöringsduk avsedd för elektronik.

Hållaren är mycket hållbar men bör torkas av om den blir utsatt för väta eftersom det annars kan slita på smörjmedlet inuti armens leder.

Om någon komponent i hållaren ändå skulle gå sönder kontaktar du Funktionsverket för att beställa reservdelar. Alla komponenter kan beställas separat.



**funktionsverket**

Tel: 031-75 77 950

E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)

Webb: [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)