


BRUKSANVISNING

iClick reläbox



funktionsverket

Översikt

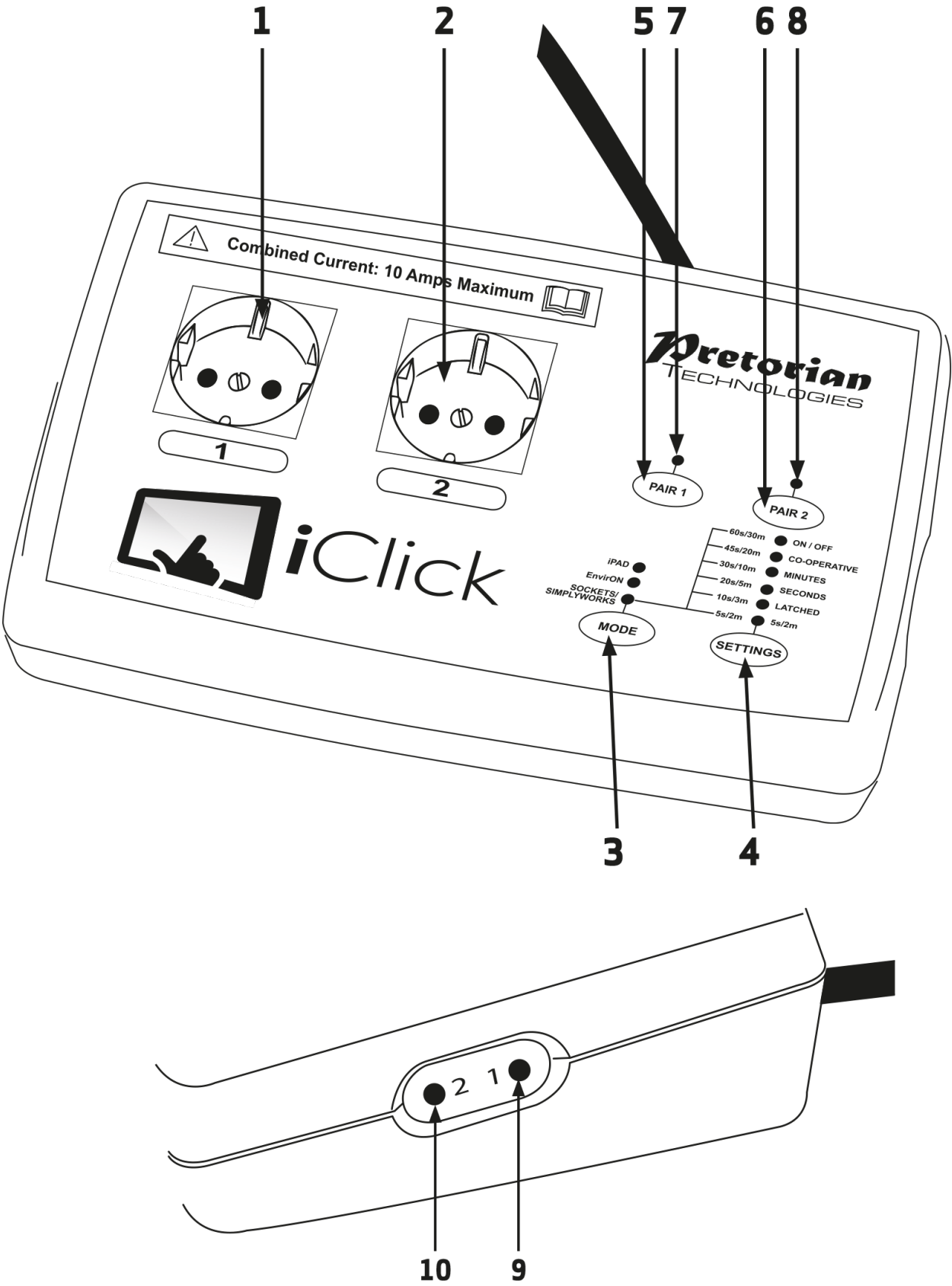

Introduktion till iClick

iClick gör att du kan styra upp till två elektriska apparater exempelvis via en iPad. Du kan exempelvis sätta på och stänga av TV, radio, lampor eller vilken annan elektrisk apparat som helst som kan kopplas in i ett vanligt eluttag.

Det finns sju olika lägen som styr apparaten på olika sätt. Tre lägen ger dig oberoende kontroll av två apparater; fyra lägen ger samtidig kontroll av båda apparaterna.

iClick kan styras med en gratisapp som du laddar ner till din iPad. Appen kan också kontaktstyras.

Kom igång med iClick

1. Anslut strömkabel på din iClick till ett vanligt eluttag.
2. Anslut din apparat till uttag 1 eller 2 och slå på din apparat.

Välj om du vill styra via iPad, EnvirON eller SimplyWorks/trådbundna kontakter. Tryck på Mode-knappen [3] tills LED-lampan bredvid det läge du vill välja lyser.

Styr via iPad

Klicka på iClick-appen på din iPad och se till att den är ansluten (se nedan hur du gör för att ansluta). Använd appen för att göra dina inställningar.

Styr via EnvirON

Anslut enheten till iClick genom PAIR1 [5] och/eller PAIR2 [6].

Styr med trådbundna kontakter

Anslut kontakterna till uttagen på sidan av iClick [9 / 10]. Använd Inställningsknappen [4] för att göra dina inställningar.

Styr med SimplyWorks trådlösa kontakter

Anslut kontakterna till iClick genom att klicka på PAIR1 [5] och/eller PAIR2 [6]. Använd Inställningsknappen [4] för att göra dina inställningar.

3. Tryck på din kontakt eller klicka på din iPad för att aktivera din apparat.

De kommande avsnitten beskriver mer i detalj de olika lägena och hur du kan använda iClick för att styra dina elektriska apparater.

Styr via iPad

Kompatibilitet

iClick kan anslutas till en iPad via appen iClick. På så vis kan du styra apparater genom att trycka på skärmen. Du behöver installera appen iClick på din iPad för att det ska fungera.

iClick-appen kräver att din iPad har iOS 8.0 eller senare. Du behöver ha en iPad 3, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro eller senare för att det ska fungera. Det fungerar inte med första generationen iPad eller iPad 2.

Du laddar ner appen kostnadsfritt från AppStore på din iPad. Sök på "iClick" eller "Pretorian" i AppStore för att hitta rätt app. Språket i appen är engelska.



Anslut iClick till iPad

Kontrollera först att iClick-enheten är inställd på iPad-läge genom att klicka på Mode [3] tills LED-lampan bredvid "iPad" lyser. Om din enhet redan tidigare har parats med din iPad kommer anslutningen att återupprättas automatiskt. Du ser detta genom att LED-lampan då lyser med ett fast sken.

Om lysdioden blinkar finns ingen iPad ansluten.

Gör så här för att ansluta till iPad:

1. Gå till iClick-appen på din iPad och klicka på Inställningar 
2. Du kommer nu se om det redan finns en enhet ansluten till din iPad eller inte.

Om ingen enhet finns ansluten ser det ut så här:




Om det redan finns en iPad ansluten ser det ut så här:



De fyra tecknen (1E17) är unika för varje enskild enhet så att du enkelt kan hålla isär anslutna enheter. Du hittar din unika kombination på en klisterlapp på din enhet.

3. För att ansluta en viss iClick, leta upp dess unika kod (fyra tecken), leta upp rätt enhet på skärmen och klicka på den för att ansluta den.

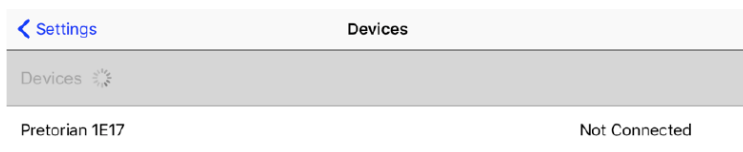

4. LED-lampan för iPad på iClick kommer att lysa med fast sken när enheten är ansluten. Du kan nu styra dina apparater via din iPad.

Inställningar i appen iClick

Ikoner på skärmen


Längst upp på skärmen finns två ikoner som främst är avsedda att användas av vårdgivare eller anhörig.



Tryck för att stänga av alla apparater om användaren får problem.



Gör inställningar för knappen eller knapparna på skärmen.

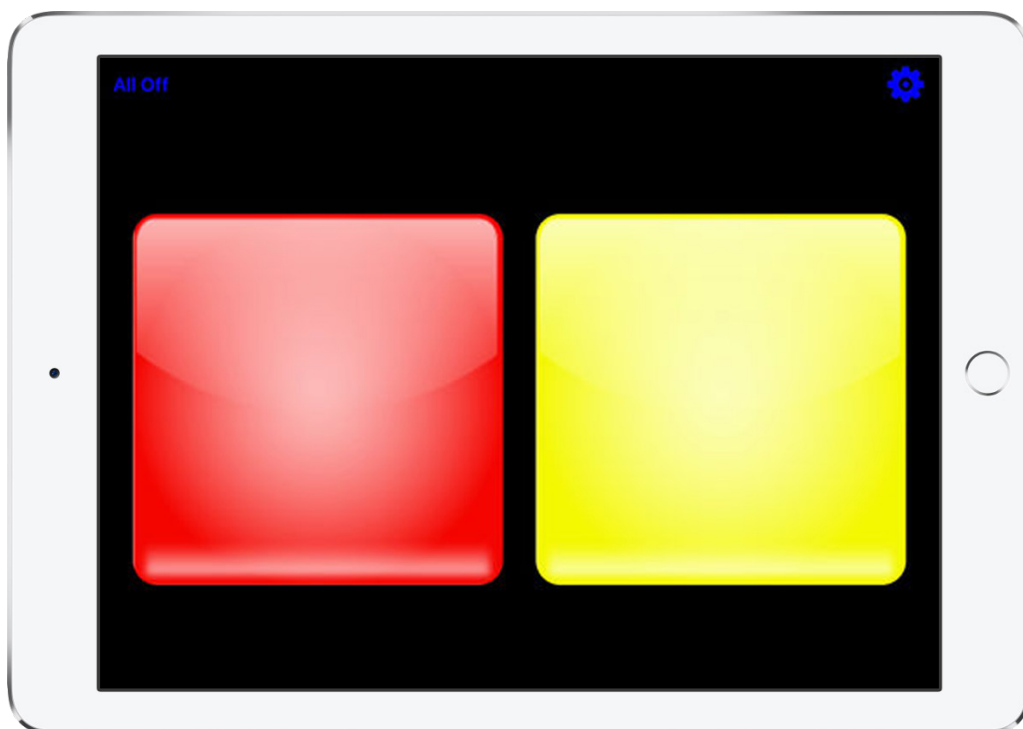

Driftsläge - *hur ska apparaten slås på/av*

Under BUTTON 1 MODE och BUTTON 2 MODE väljer du hur knapparna på skärmen ska styra apparaten som är ansluten till iClick. Du kan välja mellan sju olika lägen:

Direct

Apparaten aktiveras så länge som du trycker på knappen. När du släpper knappen stängs apparaten av. Detta läge är lämpligt för apparater som inte bör gå under en längre tid eller som inte får lämnas oövervakade, till exempel matberedare.

Latched

Apparaten aktiveras när du trycker på knappen och är påslagen tills du rör vid knappen igen. Lämplig för apparater som ska stå på en längre tid, till exempel lampor eller fläktar.

Timed

Apparaten är påslagen under en bestämd tid och stängs automatiskt av när tiden är ute. Om du vill stänga av apparaten innan tiden är slut kan du trycka på **All Off** på skärmen. Tidsperioden kan sättas till mellan 1 och 250 sekunder eller mellan 1 och 250 minuter.

Co-Operative Direct

Två användare kan hjälpas åt för att slå på apparaten/apparaterna. Var och en rör vid sin knapp och apparaten är påslagen så länge som båda trycker på sina knappar. Om en eller båda slutar trycka, stängs apparaten av. Båda uttagen aktiveras samtidigt i detta läge så länge som båda knapparna är aktiverade.

Co-Operative Latched

Två användare samarbetar för att slå på och av apparaten. Genom att trycka på knapparna samtidigt sätta apparaten igång, för att stänga av den måste knapparna återigen tryckas på samtidigt. Ingenting händer om bara en av knapparna är nedtryckt. Båda uttagen aktiveras samtidigt i detta läge så länge som båda knapparna är aktiverade.

Co-Operative Timed

Två användare samarbetar för att sätta på apparaten. Apparaten går under en bestämd tid och stängs automatiskt av när tiden är ute. Om du vill stänga av apparaten innan tiden är slut kan du trycka på **All Off** på skärmen. Tidsperioden kan sättas till mellan 1 och 250 sekunder eller mellan 1 och 250 minuter.

On/Off

Knapp 1 (vänster sida av skärmen) slår på apparaten/apparaterna och knapp 2 (höger sida av skärmen) stänger av apparaten/apparaterna. Båda uttagen slås på eller av samtidigt. Detta läge kan användas av både en och två användare, beroende på situation.



En person med kognitiva svårigheter kan exempelvis ha nytta av att se en bild på en lampa som lyser och en bild på en lampa som är släckt.

Är man två så kan den ena ha ansvar för att tända lampan och den andre för att släcka den.

BUTTON 1 MODE		
Direct		✓
Latched		
Timed		
Co-Operative Direct		
Co-Operative Latched		
Co-Operative Timed		
On/Off		

BUTTON 2 MODE		
Direct		✓
Latched		
Timed		
Co-Operative Direct		
Co-Operative Latched		
Co-Operative Timed		
On/Off		

Om du väljer Co-Operative Direct, Co-Operative Latched, Co-Operative Timed eller On/Off måste du använda båda knapparna. Det innebär att när du väljer detta alternativ för en av knapparna kommer inställningarna för den andra knappen att gråmarkeras så att du inte kan göra individuella inställningar för den knappen. Den kommer istället automatiskt att få rätt inställningar.

Om du vill göra individuella inställningar för varje knapp ska du välja något av lägena Direct, Latched eller Timed.

Välj tidsmängd för Timed


Klicka på Timer Period för att ställa in hur länge en apparat ska vara påslagen i lägena Timed och Co-Operative Timed. Du kan välja tidsmängd i en popup-meny på skärmen. Välj mellan 1-250 sekunder eller 1-250 minuter. Tidsmängden kommer att gälla för båda uttagen.

TIMER PERIOD	
Timer Period	45 sec

Knapparnas utseende – 2D / 3D

Under **BUTTON APPEARANCE** kan du välja mellan två- eller tredimensionella knappar. De tvådimensionella knapparna kan upplevas som tydligare och kan därför vara lämpliga att använda för personer som har behov av enkelhet, exempelvis många personer med autism.

Om du väljer att använda ett fotografi för en knapp kommer du inte längre att kunna välja två- eller tredimensionell, utan fotografiet kommer att visas som det är.

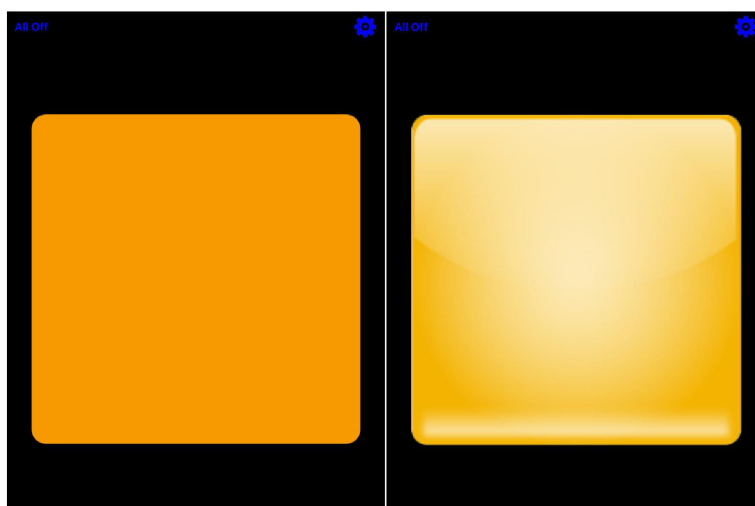

Tvådimensionell knapp

Tredimensionell knapp

BUTTON APPEARANCE	
2 Dimensional (Flat)	
3 Dimensional	✓

Knapparnas utseende – färg

Under **BUTTON SUMMARY** kan du välja färg på din knapp.

För att göra inställningar för en knapp klickar du på den lilla ikonen av knappen som finns under Button Summary i Inställningsmenyn. Du får då upp en ny meny där du kan göra dina val.

För att välja färg klickar du i menyn på den färg som du vill ha.

BUTTON SUMMARY		
1		36pt
2		36pt

Cancel **BUTTON 1 SETTINGS** Done

BUTTON 1 SETTINGS

Show Text ☐

Message Text

Text Size 36pt

Text Colour White

BUTTON APPEARANCE

Tap to Choose Photo

I menyn under Button Summary kan du göra en rad inställningar.

Knapparnas utseende – fotografi

Under **BUTTON SUMMARY** kan du välja att använda ett fotografi istället för en färg.

För att göra inställningar för en knapp klickar du på den lilla ikonen av knappen som finns under Button Summary i Inställningsmenyn. Du får då upp en ny meny där du kan göra dina val.

För att använda ett fotografi för din knapp klickar du på Tap to Choose Photo. Välj därefter om du vill använda ett foto från ditt galleri eller om du vill ta ett nytt foto med kameran.

Choose from Gallery

Take Photo

Cancel

TIPS!

Eftersom knappen i iClick är kvadratisk kan vissa bilder blir förvängda om du väljer en bild från ditt galleri. För att undvika detta rekommenderar vi att du tar ett foto inifrån appen om du har möjlighet till det.

Om du väljer att ta ett nytt foto kommer kameran automatisk att ta ett kvadratisk foto. När du tagit ditt foto kommer du att få upp en kvadrat på skärmen som du kan flytta runt för att välja det område som du vill använda för fotografiet på knappen.

När du är nöjd klickar du på Accept. Om du vill ta ett nytt foto klickar du istället på Cancel och börjar om.



Att använda fotografier för dina knappar kan både berika upplevelsen och ge en pedagogisk dimension, eftersom du kan använda bilder av apparaten som knapparna styr.

Om du till exempel använder iClick för att styra en matberedare kan du använda en bild på en matberedare. Du kan också använda en bild på en tårta om ingredienserna som blandas i matberedaren ska användas för att göra en tårta. På så vis får du både en koppling mellan knappen och apparatens användning samtidigt som användaren kan uppleva en större entusiasm och intresse för att delta i tårtbaket.

Knapparnas utseende - text

Du kan lägga till text på din knapp. Det fungerar oavsett om du använder en tvådimensionell eller tredimensionell knapp eller ett fotografi.

1. Se till att **Show Text** är aktiverad (grön).
2. Under **Message Text** skriver du in den text du vill använda. Skärmskrivbordet dyker normalt sett upp automatiskt.* När du har skrivit klart din text gömmer du tangentbordet genom att klicka på längst ner till höger på tangentbordet.



* Om du exempelvis använder en APPLICATOR kan du behöva trycka på en knapp på APPLICATOR för att visa tangentbordet.

3. Välj storlek för din text under **Text Size**. Du kan välja mellan 36pt och 64 pk.
4. Välj om du vill ha svart eller vit text under **Text Colour**. Oavsett vilken färg du väljer kommer du att få en ram runt din text i motsatt färg för att den ska synas bättre. Detta är särskilt värdefullt när du använder text ovanpå ett fotografi.



Knapparnas utseende – antal knappar

Om du använder läge Direct, Latched eller Timed kan du välja om du vill ha en eller två knappar på skärmen.

Om du exempelvis bara använder ena uttaget kan det vara bra att bara ha en knapp på skärmen. Se till att inaktivera Button 2 (grå).

BUTTON SUMMARY		
1		36pt
2		36pt
Button 2 visible on screen		

Fördröjd åtkomst

Menyknapparna på startskärmen av iClick har designats för att vara så diskreta som möjligt för att inte verka distraherande för användaren.

För att hindra användare som brukar trycka på dessa ikoner att göra oavsiktliga ändringar kan du ge dessa knappar fördröjd åtkomst (Delayed). Det innebär att du måste trycka på ikonen under ca 2 sek innan ikonen reagerar.

DELAYED ACCESS	
Immediate	
Delayed	 ✓

När Fördröjd åtkomst är aktiverad blir ikonerna mörkgrå för att göra de mindre iögonfallande.



OBS! Av säkerhetsskäl appliceras *inte* fördröjningen till **All Off**

Styr via EnvirON

EnvirON är en serie produkter för omgivningskontroll från Pretorian Technologies, läs er här: <https://www.pretorianuk.com/environmental-controls>.

Ställ iClick i läget EnvirON genom att klicka på Modeknappen [3] tills lampan bredvid EnvirON lyser.

Anslut din EnvirON-enhet till iClick genom att trycka på PAIR1-knappen [5] eller PAIR2-knappen [6] beroende på om du vill ansluta enheten till uttag 1 eller 2. LED-lampan kommer att blinka långsamt. Tryck nu på knappen Pair på din EnvirON-enhet. När LED-lampan på iClick lyser med ett fast sken i ca 5 sekunder är anslutningen klar.

Inställningsknappen [4] fungerar inte i detta läge. För att göra inställningar, se bruksanvisningen för respektive EnvirON-enhet.

Styr via externa kontakter

Tryck på Läges-knappen [3] tills lampan bredvid SOCKETS/SIMPLYWORKS tänds.

Driftsläge – *hur ska apparaten slås på/av*

Välj driftsläge genom att trycka på Inställnings-knappen [4] tills LED-lampan vid rätt läge lyser. Du kan välja mellan dessa lägen:

Direct

Apparaten är påslagen under tiden kontakten är nedtryckt.

Latched

Tryck på kontakten för att sätta på apparaten, tryck igen för att stänga av apparaten.

Seconds

Apparaten är påslagen under ett bestämt antal sekunder, mellan 5-60 sekunder.

Minutes

Apparaten är påslagen under ett bestämt antal minuter, mellan 2-30 minuter.

Co-Copertive (kräver två kontakter)

Båda kontakterna måste vara nedtryckta samtidigt för att sätta på båda uttagen. Båda uttagen slås av om en eller båda kontakterna släpps.

On/Off (kräver två kontakter)

Kontakt 1 slår på båda apparaterna, kontakt 2 slår av båda apparaterna.

När du valt vilket läge du vill använda, kommer LED-lampan bredvid att slockna efter några sekunder. Valt läge kommer också att sparas i enhetens minne och vara redo nästa gång enheten tas i bruk.

Om du har valt Seconds eller Minutes, måste du även välja tidsmängd. Tryck och håll nedtryckt Inställnings-knappen [4]. Tidperioden står på vänster sida av LED-lamporna och den högsta LED-lampa som är tänd är den som gäller.

Om exempelvis alla LED-lampor upp till 5m är tänd i läge Minutes, kommer uttagen att aktivera appaten under 5 minuter när du trycker på kontakten.

OBS! Du kan alltid avbryta tidperioden i förtid genom att trycka på PAIR1 (för uttag 1) och PAIR2 (för uttag 2).

Båda uttagen kommer alltid att ha samma funktion.

Använd trådbundna kontakter

Anslut dina trådbundna kontakter till uttagen på sidan av enheten [9, 10]. Se till att du har valt SOCKETS/SIMPLYWORKS.

Använd SimplyWorks trådlösa kontakter

Se till att du har valt SOCKETS/SIMPLYWORKS.

Anslut först din SimplyWorks-kontakt till iClick genom att trycka på PAIR1-knappen [5] eller PAIR2-knappen [6] beroende på om du vill ansluta enheten till uttag 1 eller 2. LED-lampan kommer att blinka långsamt. Tryck nu på knappen Pair på din SimplyWorks-kontakt. När LED-lampan på iClick lyser med ett fast sken i ca 5 sekunder är anslutningen klar.

Alla sändande SimplyWorks produkter kan användas tillsammans med iClick.

Övriga funktioner

Avbryta tidsinställd aktivering i förtid

Om en kanal är inställd på en viss tidsinställd aktivering kan du avbryta aktiveringen i förtid genom att trycka på antingen PAIR1 eller PAIR2 [5, 6].

Se vilket uttag som är aktiverat

PAIR1 och PAIR2 [7, 8] visar vilket uttag som är aktiverat. Pair 1 LED [7] lyser när uttag 1 är aktiverat och Pair 2 LED [8] lyser när uttag 2 är aktiverat.

OBS! LED-lamporna kommer fortfarande att blinka kort när de tar emot en signal från en trådlös kontakt.

Säkerhetsinstruktioner



- Använd inte enheten i närheten av vatten.
- Enheten är avsedd för inomhusbruk.
- Se regelbundet över enheten så att inga delar skadats. Var särskilt uppmärksam på kablar och eluttag. Använd inte enheten om du hittar skador.
- Försök aldrig att tvinga in kontakter i eluttagen eller göra åverkan på skyddsluckor.
- Enheten kan när som helst kopplas bort genom att dra ur strömförsörjningskabeln. Se till att kabeln är lättillgänglig så att detta kan ske snabbt i händelse av en nödsituation.
- Behandla elektriska apparater som är anslutna till enheten som att de när som helst kan sättas igång, även oväntat. Se till att apparaten är fränkopplad från enheten innan någon åtgärd tas som kan utgöra en fara, även om apparaten inte är aktiverad.
- Öppna aldrig enheten eller försök reparera den på egen hand.
- Använd inte enheten i närheten av brandfarliga gaser eller i explosiva miljöer.
- Se till att du är bekant med de apparater som du ansluter till Energise genom att läsa bruksanvisningen för respektive produkt och/eller använda dem separat.

Enheten överensstämmer med följande standarder:



Type B Applied Part

EN60601-1

EN55022

iClick uppfyller även kraven för en Klass B digital enhet enligt del 15 i FCC-reglerna.

Rengöring

Dra alltid ur iClicks kontakt ur eluttaget innan rengöring. Rengör iClick med en torr trasa. Använd aldrig vatten eller andra vätskor för rengöring!

Miljöinformation

Precis som alla elektroniska enheter så innehåller iClick metaller. Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst och är därför extra viktiga att få tillbaka in i kretsloppet. Släng därför aldrig din iClick i soporna utan lämna in den till en miljöstation. Sorteras som elavfall.

Du kan också skicka in din gamla iClick till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss



031-75 77 950



info@funktionsverket.se



www.funktionsverket.se



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se