

Artikelnummer: 341010
341011
341012

BRUKSANVISNING

Minitangentbord för iPad



funktionsverket

Kompatibilitet

Tangentbordet är anpassat för att fungera med en iPad eller iPhone samt Mac OS X v. 10.1 eller senare.

Det är också ett utmärkt tillbehör till PredictablePlattan för de användare som föredrar ett fysiskt tangentbord framför att använda skärmtangentbordet.

Slå på tangentbordet

Minitangentbord för iPad drivs på 2 st AAA-batterier.


Öppna batteriluckan på baksidan av din tangentbordet. Sätt i 2 st AAA-batterier och sätt därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på tangentbordet genom att dra den lilla spaken på baksidan av tangentbordet till On.

Anslut tangentbordet till din iPad/PredictablePlatta



Öppna appen Inställningar och gå till menyn Bluetooth.

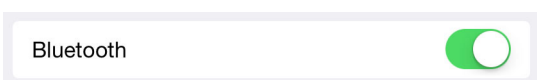

Se till att Bluetooth är aktiverat (grön).

Din iPad eller PredictablePlatta söker nu efter tangentbordet, som måste vara påslaget för att det ska fungera. Tryck och håll in knappen "Connect" på baksidan under 3 sekunder till dess att LED-lampan på framsidan blinkar.

Efter några sekunder dyker tangentbordet upp som en enhet på din iPad. Klicka på namnet Bluetooth Logickeyboard för att starta anslutningen. Det dyker upp en ruta med en fyrsiffrig kod. Skriv koden på tangentbordet och tryck Enter. Nu ska tangentbordet stå som Ansluten.

Skriv in Fn + Ctrl + W på tangentbordet. Klart!

Bluetooth är en trådlös anslutning med en räckvidd på ca 10 meter.

Anslut tangentbordet till en Mac

För att använda tangentbordet tillsammans med en Mac gör du så här:

Sätt på tangentbordet. Tryck och håll in knappen "Connect" på baksidan under 3 sekunder till dess att LED-lampan på framsidan blinkar.

Öppna Bluetooth på din Mac och leta upp Bluetooth Logickeyboard i listan över enheter. Klicka på Pair för att starta anslutningen.

Det dyker upp en ruta med en sexsiffrig kod. Skriv koden på tangentbordet och tryck Enter. Nu ska tangentbordet stå som Ansluten.

Skriv in Fn + Ctrl + Q på tangentbordet. Klart!

Bluetooth är en trådlös anslutning med en räckvidd på ca 10 meter.

Anpassade funktionstangenter


Minitangentbordet har specialanpassade tangenter för iOS. Nedan ser du deras funktioner:



Hemknappen




Sänk ljusstyrkan på skärmen | Höj ljusstyrkan på skärmen

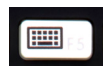


Visa/Dölj skärmtangentbordet



Sök

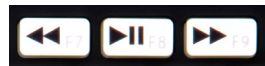

Funktioner för mediaspelaren: Föregående | Play/Paus | Nästa

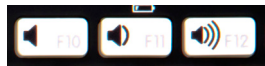

Ljud på/av | Sänk volymen | Höj volymen



Stäng av/Sätt på skärmen

Automatiskt viloläge

Om du inte använt tangentbordet på 15 minuter kommer det automatiskt att gå ner i viloläge för att spara batteri. Tryck på valfri tangent så vaknar tangentbordet efter 4 sekunder.

Dags att byta batterier?



När batterierna börjar ta slut kommer en röd LED-lampa att börja pulsera. Då är det dags att byta batterierna. De gamla batterierna lämnas in till batteriinsamling. Elda aldrig upp ett batteri!

Rengör tangentbordet

Vi rekommenderar att du rengör ditt tangentbord minst en gång per månad.

Stäng först av tangentbordet. Torka av det några gånger med en mjuk lätt fuktad trasa. Låt torka. Det ingår en rengöringsduk i leveransen med ett särskilt antibakteriellt medel.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se