

## Systemåterställning

# WidgitPlattan XL

### Förberedelser

1. Anslut enheten till en strömkälla.
2. Anslut enheten till Wifi. Systemåterställning kräver internetåtkomst.
3. Notera enhetens serienummer och kontakta Funktionsverket.
4. Efter att återställningen initierats av Funktionsverket startas enheten om automatiskt.

### Instruktioner efter omstart

1. Vid val av region och språk: "Sverige" och "Svenska".
2. Välj Wifi och logga in så att enheten får internetåtkomst igen.
3. Vid skärmen Snabbstart: "Ställ in manuellt".
4. Vid skärmen Fjärrstyrning: "Nästa".
5. Vid skärmen Platstjänster: aktivera Platstjänster.
6. Enheten kommer nu återställa appar, bakgrundsbild etc. Vänta ett par minuter.  
När ikonerna för Widgit Go XL dyker upp i "dock"-fältet längst ner på skärmen och går från att vara skuggad till att vara vanlig färg är installationen klar.
7. Öppna appen Inställningar och gå till menyn Hemskärm & dock.
8. Inaktivera alternativet "Visa föreslagna och senaste appar i Dock".
9. Gå till menyn Notiser. Under "Förhandsvisa" välj alternativet "Aldrig".
10. Gå till menyn Kontrollcenter. Inaktivera alternativet "Åtkomst inuti appar".

**Klart!**



**funktionsverket**

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)