



BRUKSANVISNING

Shake Awake väckarklocka

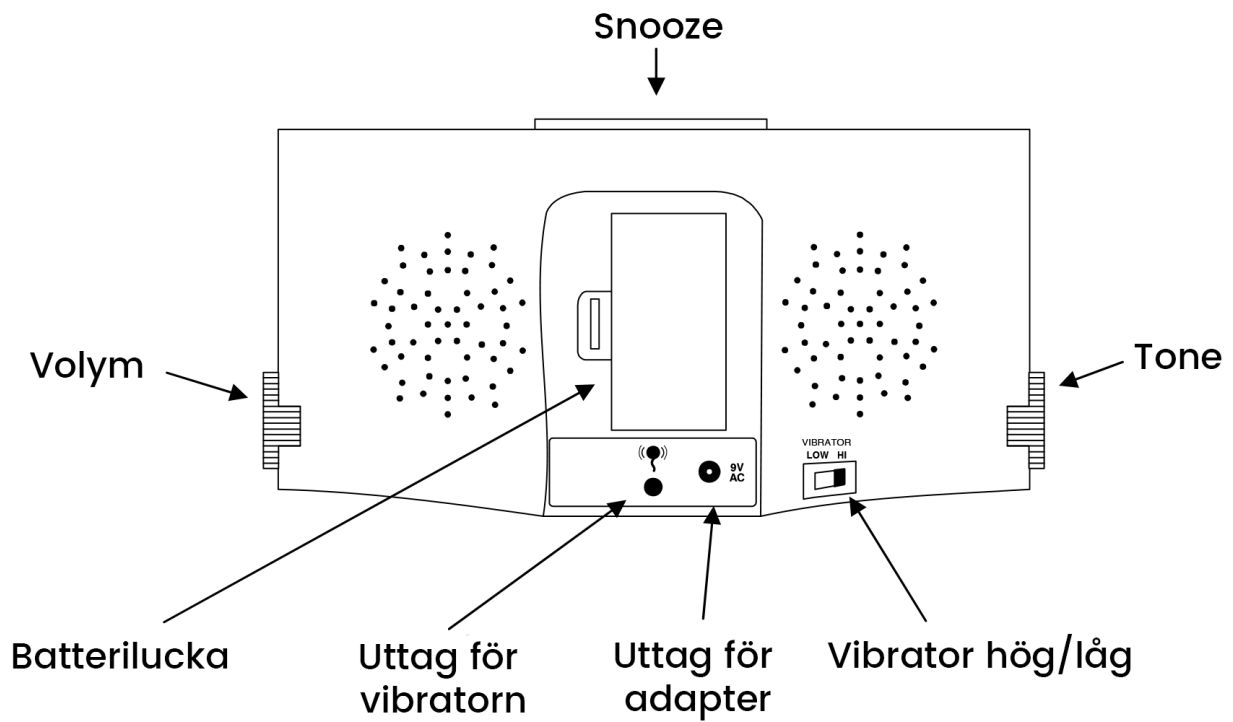

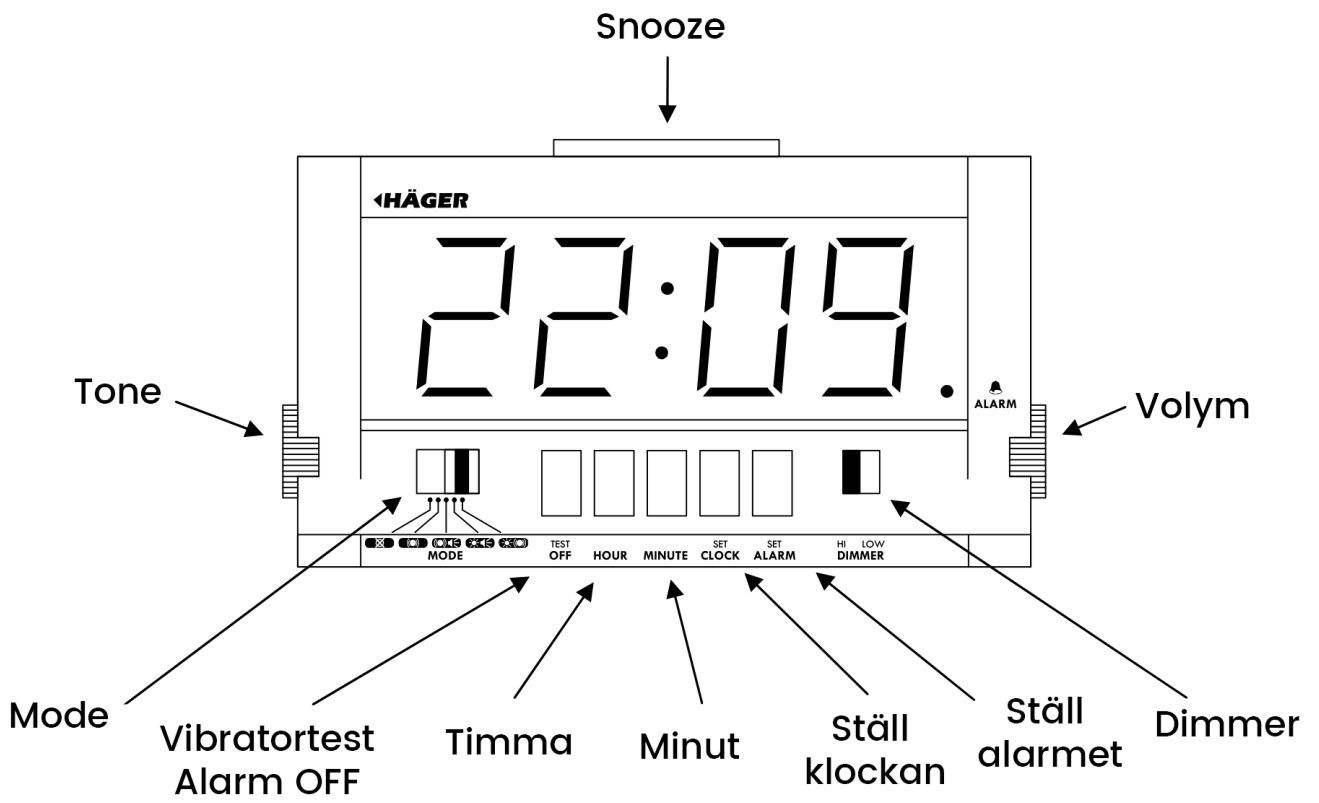

Koppla in Shake Awake

Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett vanligt vägguttag. Siffrorna i displayen tänds.

Om du önskar kan du koppla in ett 9V batteri som backup om strömmen går. Batterifacket finns bakom luckan på baksidan av enheten. Vid strömavbrott kommer klockan då inte att tappa tiden även om siffrorna slocknar. Så fort strömmen kommer tillbaka visas korrekt tid igen.

Koppla in shakern i uttaget på baksidan. Placera shakern under exempelvis din kudde.

Ställa klockan

Tryck och håll nere knappen SET CLOCK. Tryck fram rätt tid med HOUR (timme) och MIN (minut). Släpp SET CLOCK när du är klar.

Ställa alarmet

Tryck och håll nere knappen SET ALARM. Tryck fram rätt tid med HOUR (timme) och MIN (minut). Släpp SET ALARM när du är klar.

Välj typ av väckning med MODE-väljaren. Du kan välja mellan dessa lägen:



OFF - allting avstängt



Vibrator



Vibrator + Alarmsignal



Lysande snooze knapp + Alarmsignal



Lysande snooze knapp + Vibrator

Snooze

Bra för oss som vill ligga kvar och dra oss en stund. Tryck in Snooze så slutar alarmet, men startar igen efter 9 minuter. En autosnoozefunktion aktiveras när kuddvibratören används. Den gör att vibratören automatiskt pausar efter ca 2,5 minuters vibration för att starta 9 minuter senare om du inte stänger av alarmet med OFF-knappen.

Stänga av alarmet

Tryck på OFF/TEST knappen eller dra MODE-väljaren till OFF-läget.

Dimmer

Med denna knapp ställer du in hur ljusst siffrorna i klockan skall lysa.

Volym

Vrid på denna för att ställa in önskad ljudstyrka på alarmet.

Tone

Vrid på denna för att ställa in önskad tonhöjd på alarmet.

Test av vibratorn

Med OFF/Test-knappen kan du prova hur starkt vibratorn vibrerar. Ställ in stark eller svag vibration med väljaren på baksidan.

Batteri

Batteri är inte nödvändigt för funktionen. Med batteri inkopplat slipper du dock ställa in klockan igen efter strömavbrott. Väljer du att ansluta batteri bör det vara ett 9-volts batteri av alkalisk typ. Kontrollera batteriet varje år. Gamla batterier kan börja läcka och det skadar din väckarklocka.

Skötsel

Enheten kan torkas av med en fuktig trasa med svag tvållösning. Använd inga starka lösningsmedel. Placera inte klockan i starkt solljus. Den är avsedd för normalt inomhusbruk och bör därför inte utsättas för fuktig miljö eller extrema temperaturer.

Felsökning

Inga siffror syns på displayen

Kontrollera att adaptorn är inkopplad i jacket på baksidan. Kontrollera att adaptorn sitter i ett fungerande vägguttag. Kontrollera att vägguttaget fungerar med t ex en fungerande lampa. Kontrollera även att dimmerknappen står i rätt läge. Fungerar klockan ändå inte – kontakta oss!

Kuddvibratorn fungerar inte

Kontrollera att vibratorn är inkopplad i uttaget på baksidan av enheten. Kontrollera att MODE-väljaren står i SHAKER-läget. Ställ in en väckning om två minuter för att prova om shakern då går igång. Fungerar shakern fortfarande inte – kontakta oss!

Alarmet låter inte

Kontrollera att MODE-väljaren står i läge AUDIO. Ställ in en väckning för att prova om larmet går igång. Ljustera ljudnivån med VOLYM. Fungerar alarmet fortfarande inte – kontakta oss!

Garanti

Klockan levereras med ett års garanti mot fabriktionsfel. Garantin gäller ej felaktigt handhavande eller skador till följd av yttre påverkan som t ex överspänningar från elnätet eller blixtnedslag.

Miljöinformation

Ska lämnas in till återvinningsstation och sorteras som elavfall. Kasta aldrig batterier i soporna eller elda upp dem.

Du kan också skicka in din Shake Awake till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.



Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se