

BRUKSANVISNING

SimplyWorks Joystick




① Kompatibilitet

Simply Works Joystick är kompatibel med alla SimplyWorks-mottagare för dator och kontaktstyrda leksaker.

② Sätt i batteriet

Ta bort batteriluckan på undersidan av enheten och sätt i ett 9V-batteri. Om du har för avsikt att inte använda din SimplyWorks Joystick på ett tag så bör du ta ur batteriet för att förhindra att batteriet läcker och på så vis skadar enheten.

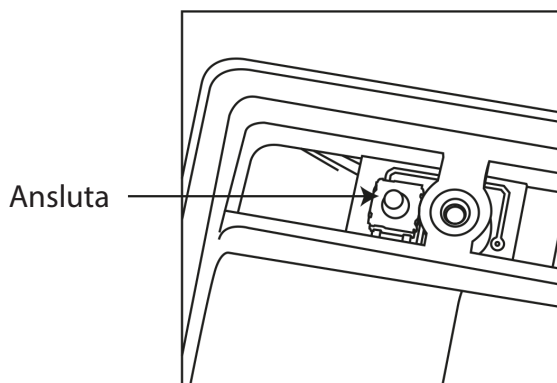

③ Anslutning

Innan du kan använda din SimplyWorks Joystick måste den kopplas samman med en SimplyWorks-mottagare, till exempel Receive2.

Gör så här för att koppla ihop enheterna:

1. Ta bort batteriluckan på SimplyWorks Joystick
2. Placera SimplyWorks-mottagaren inom 1 meter från din SimplyWorks Joystick.
3. Tryck kort på anslutningsknappen på mottagar-enheten. LED-lampan på mottagaren börjar nu blinka långsamt.
4. Inom 10 sekunder, tryck kort på anslutningsknappen inuti batterifacket i din SimplyWorks Joystick.
5. Efter en kort stund kommer LED-lampan på mottagarenheten att lysa stadigt under ca 5 sek, vilket indikerar att ihopkopplingen är klar.
6. Om LED-lampan slutar blinka utan att den lyser med ett fast sken enligt steg 5, upprepa från steg 3.

④ Ställ in hastigheten

SimplyWorks Joystick har fyra hastighetsinställningar för musmarkören.

För att ändra markörens hastighet, tryck och håll nere Dra-och-Släpp-knappen tills du hör ett pip, släpp sedan.

För att minska hastigheten, klicka på knappen för vänsterklick. Varje tryckning minskar stegvis markörens hastighet.

För att öka hastigheten, klicka på knappen för högerklick. Varje tryckning ökar stegvis markörens hastighet.

När du har funnit lämplig hastighetsinställning för markören, tryck och håll nere Dra-och-Släpp-knappen tills du hör ett pip.

Markörhastigheten är nu inställd.

⑤ Dra-och-Släpp

Används för att flytta objekt på skärmen utan att behöva hålla nere vänster musknapp och samtidigt hantera joysticken.


Tryck på knappen Dra-och-Släpp för att aktivera läget. När du är klar trycker du på valfri knapp för att avbryta läget.

⑥ Miljöinformation

Om SimplyWorks Joystick inte fungerar, felsök den gärna. Se mer information på vår hemsida www.funktionsverket.se

Visste du att metaller går att återvinna hur många gånger som helst? Det är en bra anledning att låta din gamla trotjänare bli återfödd in i kretsloppet! Återvinns som elavfall.

Du kan också skicka in din gamla SimplyWorks Joystick till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.

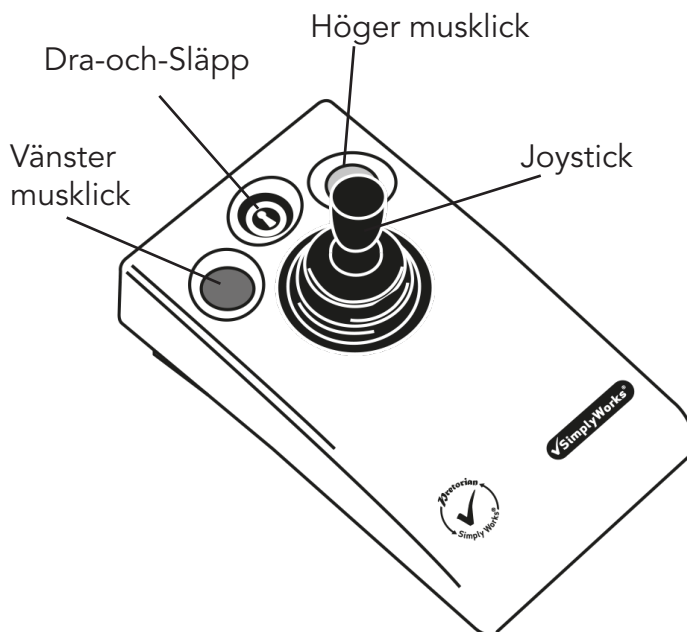

⑦ SimplyWorks trådlösa system

SimplyWorks är ett trådlöst system speciellt utvecklat för alternativa inmatningsenheter för användare med motoriska svårigheter.

Det finns flera olika produkter som trådlöst kan kopplas samman tillsammans med en SimplyWorks-mottagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor om SimplyWorks trådlösa system!



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se