

REDIGERA KALENDER OCH INSTÄLLNINGAR

Dra uppåt över pekskärmen med 2 eller 3 fingrar så visas en ny meny "Aktivitet" och "Inställningar". För att komma ur denna meny, tryck på "X" längst upp till höger.

Aktivitetskalender

När du har kommit till kalendermenyn i Clockaid visas en kalender. Välj ett datum för en händelsen och ange namn och tid, du kan också slå på ett alarm på höger sida av skärmen.




Skapa en ny händelse eller en kommunikation

- ✓ Välj önskad dag
- ✓ Tryck på +
- ✓ Ange tidpunkt
- ✓ Använd något av de fem förslagen eller skriv ditt eget meddelande / text
- ✓ Välj hur ofta händelsen upprepas, dagligen, veckovis eller månadsvis
- ✓ Tryck Spara
- ✓ Tryck krysset uppe i det högra hörnet när det är klart, så stängs kalendern
- ✓ Nu ser du händelsen i aktivitetsfältet

Inställningar

Knappen "Inställningar" öppnar inställningsmenyn.
VÄNSTER: Inställningarna för personliga uppringningar och språkinställningar
HÖGER: fotogalleri

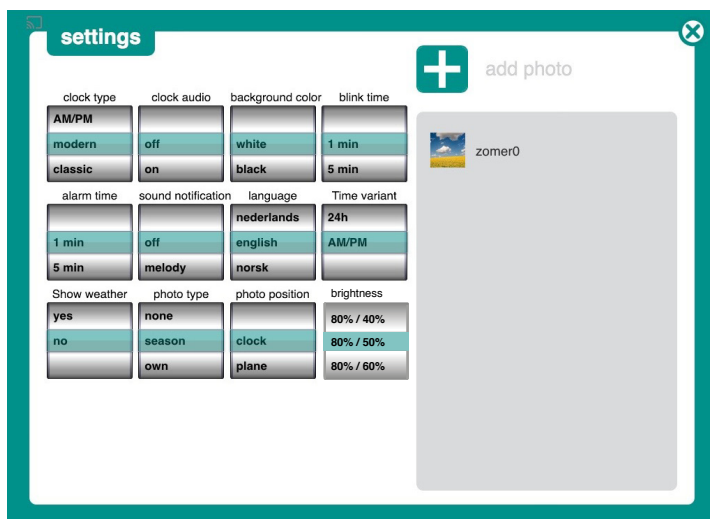

- ✓ Klocka: Välj mellan fyra utseende: Digital, modern analog, klassisk analog och AM / PM
- ✓ Klockljud: Välj mellan 'På / Av'
- ✓ Välj klockbakgrundsfärg: Vit, Svart eller Grå
- ✓ Alarm: Välj start för förlarmet, som kommer att vara i en minut
- ✓ Skärmmeddelande: Välj hur länge meddelandet ska vara synligt när larmet är slut.
- ✓ Larmsignal: Välj mellan olika larmsignaler eller "Av"
- ✓ Språk: Välj önskat språk
- ✓ Tidsformat: 24-timmarsformat eller AM / PM
- ✓ Vecka: 'På / Av'
- ✓ Foto: lägg till bilder: välj mellan säsongsbilder, egna foton eller inget foto.
- ✓ Fotoplats: I Klockan eller bakgrund
Tryck på krysset längst upp till höger när du är klar så kommer att se klockan i önskad design.

Via www.clockaid.com hantera kalendrarna och kontot

Online fjärrstyrning

Access via Internet

- ✓ Gå till webbplatsen clockaid.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord
- ✓ Välj den Klocka eller kalender du vill redigera
- ✓ Redigera kalender: Datum, aktiviteter, tider, etc.
- ✓ Spara och logga ut

Logout | info@clockaid.com

clockaid™ DIGITAL CALENDAR CLOCK MANAGE CALENDARS CONTACT

Edit calendar:
 Products & account

activity calendar

thursday 16 june

su	mo	tu	we	th	fr	sa
29	30	31	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	01	02

« JUNE 2016 »

Legend:

- 01 Today
- 01 Day with repeated activities
- 01 Selected day
- 01 Day with activities

Produkter och konton

Produkter

Här kan du ge din / dina Clockaid-skärm (ar) ett namn. Detta är endast relevant om du hanterar flera kalendrar på distans.

Konto

Under "konto" kan du lägga till och / eller ändra administratörens namn.

Logout | info@clockaid.com

clockaid™ DIGITAL CALENDAR CLOCK MANAGE CALENDARS CONTACT

Products

New serial nr

Add a serial nr

peter

Change the code to a recognizable name

CKM40

Change the code to a recognizable name

FBJ01-240NM-1LP3Z-MSH05-F4JG0

Change the code to a recognizable name

Save all changes

Account

E-mail address

Firstname*

Surname*

Street*

Nr.*

Postal code*

City*

Country*

Phonenumber*

☐ Change password

Current password *

New password *

Confirm the new password *

Save all changes

Cancel

Förklaringar och råd till slutanvändaren!

Var noga med att ge (äldre) användare en grundlig förklaring av klockan. Clockaid är egentligen bara en klocka som alltid ger dig rätt tid, dag och datum. Clockaid är en stor hjälp som påminner användaren av olika saker: medicin, möten etc. Valet av alarmton och det visuella larmet ska göras av slutanvändaren. Glöm inte att kontrollera om alla funktioner fungerar korrekt och se om några justeringar ska göras efter några dagar. Gör det regelbundet och se till att larmet tolkas korrekt av användaren.