

BRUKSANVISNING

Mini Cup Switch kontakt

① Ansluta kontakten

Anslut kontakten till den enhet du önskar som har ett mono 3,5 mm-uttag.



OBS! Du behöver en kontaktlåda (APPLICATOR, etc) för att ansluta Mini Cup Switch till en dator (säljes separat).

② Aktivera kontakten

När du trycker ner kontaktens tryckyta aktiveras den enhet som kontakten är ansluten till.



③ Förvaring och rengöring

Koppla ur kontakten innan rengöring med lätt fuktig trasa eller alkohol. Använd inte lösningsmedel eller sänk ner kontakten i vatten. Utsätt inte kontakten för extrem värme eller kyla. Var försiktig med kontaktens sladd så den inte skadas.

④ Montering

Mini Cup Switch kan monteras på ett flertal olika sätt. Kontakta oss på Funktionsverket för mer info.



⑤ Klistermärken i färg

Det ingår fem olika färgade klistermärken. Använd dessa för att ge din kontakt det utseende du önskar.

⑥ Specifikationer

Aktiveringsyta	25 mm
Aktiveringskraft	130 g
Feedback	Taktil, Auditiv
Sladdlängd	152 cm
Typ av sladd	3,5 mm monoplugg



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se