

BRUKSANVISNING

CST KidTrac Trackball

Introduktion

CST KidTrac är en färgglad trackball med en stor gul silkeslen styrkula.

Knapparna är tydligt färgmarkerade för att passa både barn och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De färgade knapparna gör det också enklare för personer med nedsatt syn att använda trackballen.



Anslut KidTrac till dator

Anslut USB-kabel till en ledig USB-ingång på din dator. Du kan börja använda KidTrac direkt!

Anslut KidTrac till iPad eller iPhone

För att ansluta KidTrac till en iPad eller iPhone behöver du en Apple Lightning till USB 3 adapter, artikelnr 309100, som gör att du kan ansluta USB-kabeln. Din iPad eller iPhone behöver även vara uppdaterad till iOS 13 / iPad OS 13 eller senare för att du ska kunna använda muspekare.



Knapparnas funktion

BLÅ Vänster knapp = vänster musklick

RÖD Höger knapp = höger musklick

GRÖN mittknapp = dra-och släpp. Klicka för att låsa ett objekt, rulla styrkulan för att dra objektet över skärmen och klicka på den gröna knappen igen för att släppa objektet på den nya platsen.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se