

## BRUKSANVISNING

# Cup Switch kontakt

### ① Ansluta kontakten

Anslut kontakten till den enhet du önskar som har ett mono 3,5 mm-uttag.

OBS! Du behöver en kontaktlåda ( APPLICATOR, etc) för att ansluta Cup Switch till en dator (säljes separat).

### ② Aktivera kontakten

När du trycker ner kontaktens tryckyta aktiveras den enhet som kontakten är ansluten till.



### ③ Förvaring och rengöring

Koppla ur kontakten innan rengöring med fuktig trasa eller alkohol. Använd inte lösningsmedel.

Cup Switch är IP67-klassad och tål att sänkas ned i vatten under ca 30 min.

Utsätt inte kontakten för extrem värme eller kyla. Var försiktig med kontaktens sladd så den inte skadas.

### ④ Montering

Cup Switch kan monteras på ett flertal olika sätt. Kontakta oss på Funktionsverket för mer info.

### ⑤ Klistermärken i färg

Det ingår fem olika färgade klistermärken. Använd dessa för att ge din kontakt det utseende du önskar.

### ⑥ Specifikationer

Aktiveringsyta	51 mm
Aktiveringskraft	340 g
Feedback	Taktil, Auditiv
Typ av sladd	3,5 mm monoplugg



**funktionsverket**

Tel: 031-75 77 950

E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)

Webb: [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)