

BRUKSANVISNING


Talking Brix 2

Introduktion

Talking Brix 2 är ett 3-pack av samtalsapparater av typen "talknapp". De kan användas individuellt eller fästas i varandra.

På varje talknapp kan du spela in ett meddelande på 10 sekunder, vilket faktiskt är mer än vad det låter.

På baksidan finns ett inspelningslås som minimerar risken att du ofrivilligt raderar ett meddelande.

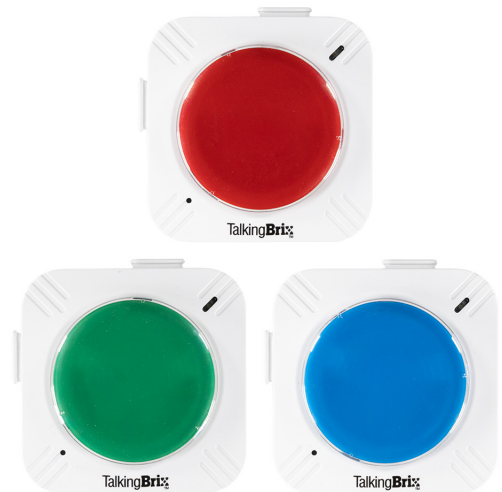

Spela in meddelande

1. Dra spaken på baksidan till REC.
2. Tryck och håll nere den färgade kontaktytan på framsidan.
3. När lampan börjar blinka, läs in ett meddelande på upp till 10 sek.
4. När du är klar släpper du trycket på den färgade kontaktytan.
5. Dra spaken på baksidan från REC till ON. Klart!



Spela upp meddelande

Tryck på den stora färgade kontaktytan på framsidan av TalkingBrix 2 för att spela upp ditt meddelande.

Använd bildstöd med det medföljande locket

Bildstöd om max 32 mm i diameter med symboler, bilder, foton och/eller text kan användas för att förtydliga vad ditt meddelande handlar om.

Lyft det transparenta locket, placera ditt bildstöd ovanpå den färgade tryckytan och sätt tillbaka det transparenta locket.

Koppla ihop flera TalkingBrix 2

Du kan koppla ihop flera TalkingBrix 2 och på så vis få flera olika trycktytor i samma apparat. Koppla samman de genom att haka i fästena på sidorna av enheten.



Inbyggd magnet

TalkingBrix 2 har en inbyggd magnet som gör att den enkel att montera på metalliska/magnetiska ytor, exempelvis en kylskåpsdörr.

Ladda batteriet

När batteriet behöver laddas kommer LED-lampan att blinka rött tre gånger efter att du har spelat upp ditt meddelande. Anslut TalkingBrix 2 till den medföljande laddaren. Lampan kommer att ha ett fast rött sken under tiden batteriet laddas. När lampan blir grön är batteriet fulladdat.

Du kan inte använda TalkingBrix 2 under tiden som batteriet laddas.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se