

## BRUKSANVISNING

# Dintido MED



## Innehållsförteckning

Starta Dintido MED.....	3
Välj språk.....	3
Ändrabakgrundsfärg.....	3
Ställ in tid och datum.....	4
Allmänt om påminnefunktionen.....	4
Skapa en påminnelse.....	5
Övriga knappar och uttag.....	6
Garanti & Miljöinformation.....	7

## Starta Dintido MED

Anslut kontakten till ett eluttag.

Håll startknappen intryckt i c:a 3 sekunder för att slå på Dintido.

OBS! Det kan ta lite tid innan Dintido startar, då det inbyggda batteriet kan vara urladdat. Se till att den är ansluten till eluttaget och vänta till dess att flaggorna visas på skärmen.

Startprocessen bör vanligtvis inte ta längre än 30s - 1 min vid den första uppstarten. Dröjer det lång tid ber vi dig kontakta oss.



Startknappen

## Välj språk

Dintido finns på flera olika språk. Tryck på den svenska flaggan på skärmen för att få svensk text på displayen.



## Ändra bakgrundsfärg

Du kan välja mellan

- svart bakgrund med vit text
- vit bakgrund med svart text:

Tryck någonstans på skärmen där det inte står någon text så ändras bakgrundsfärgen. Tryck igen för att ändra igen.

**Torsdag kl. 17:10**  
**15 september**  
**År 2016** **Dag**

**Torsdag kl. 17:10**  
**15 september**  
**År 2016** **Dag**

## Ställ in tid och datum

Dintido är klar att användas vid leverans och du behöver normalt inte göra några inställningar. Den klarar normalt även strömavbrott. Om enheten står utan ström en längre tid kan du behöva göra nya inställningar:

1. Tryck på det som du vill ändra på skärmen. Om du t ex vill ändra tiden på bilden till höger trycker du på 10.



Torsdag kl. 17:10  
15 september  
År 2016      Dag

2. Efter ca 10 sekunder dyker det upp två pilar på skärmen. Tryck på pilarna för att ställa in rätt tid.



Torsdag kl. 17:10  
15 september  
År 2016      Dag

## Allmänt om påminnelsefunktionen

Du kan ställa in upp till sju dagliga påminnelser. Exempelvis kan du påminna om att ta medicin eller att dricka ett glas vatten.

För att undvika att användaren raderar påminnelser, anger du ett lösenord (dintido) för att komma åt menyn. Där kan du sen enkelt skriva in, ändra eller radera en påminnelse.

### Så fungerar påminnelser på Dintido MED

- Vid varje påminnelse hörs en signal och texten som du skrivit in visas.
- När användaren trycker ok, försvinner påminnelsen.
- Om användaren inte trycker OK repeteras signalen tre gånger: efter 5, 10 och 15 minuter, tills användaren trycker OK.
- Om användaren inte trycker OK, försvinner påminnelsen efter 1 timma.

Var uppmärksam på att det är samma påminnelse som visas varje dag. Du kan alltså inte ställa in Dintido MED till att påminna om något enbart på t ex måndagar.

## Skapa en påminnelse

1. Tryck fem gånger på Dintidos logga, i nedre högra hörnet. Ett nytt fönster öppnas.
2. Tryck en gång där det står "Skriv in lösenordet här", skriv koden (dintido) och tryck sedan "Nästa".

### Skriv lösenordet och tryck på NÄSTA:

Skriv in lösenordet här

Nästa

Avbryt

3. Tryck på Skapa (den gröna).

### Skapa en påminnelse

- 1: -
- 2: -
- 3: -
- 4: -
- 5: -
- 6: -



Spara och stäng

4. Nu visas nedanstående meny. Inställ tid (timme och minuter) markeras med gult.

### Påminnelse1:

10:00

Timme

Minut

Påminnelsestext (0/90 tecken):

10	00
11	15
12	30
13	45

Skriv påminnelse här

Spara

Avbryt

5. Skriv en text som passar till din påminnelse med tangentbordet på skärmen. Du kan skriva max 90 tecken.

**Påminnelse1:**

**9:00** God morgon! Kom ihåg din morgonmedicin.

**Timme Minut Påminnelsestext (39/90 tecken):**



6. Tryck någonstans ovanför texten på det vita och tryck sedan på Spara.
7. Om du vill skapa fler påminnelser gör du på samma sätt som ovan från Steg 3.
8. När du har lagt in alla påminnelser du önskar, tryck Spara och stäng.

## Övriga knappar och uttag

Dintido MED har endast en knapp som har en funktion och det är startknappen.

Övriga knappar och ingångar är inaktiverade på maskinvarunivå. Dessa fyller alltså ingen funktion på den här modellen av Dintido. Knapparna på den vänstra sidan av skärmen reglerar ljudvolym, men eftersom Dintido MED inte har något ljud annat än vid uppstarten används inte dessa i praktiken inte till någonting annat.

## **Garanti & Miljöinformation**

Du har 2 års garanti för fabrikationsfel på Dintido MED. Kontakta oss om någonting verkar fel!

En uttjänt enhet sorteras som elavfall. Du kan också skicka in enheten till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.

# Du är alltid välkommen att kontakta oss

---



031-75 77 950



[info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)



[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)



## funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)