

## BRUKSANVISNING

# BIG TalkingBrix



### Spela in meddelande

1. Dra spaken på baksidan till REC.
2. Tryck och håll nere den färgade kontaktytan på framsidan.
3. När lampan börjar blinka, läs in ett meddelande på upp till 10 sek.
4. När du är klar släpper du trycket på den färgade kontaktytan.
5. Dra spaken på baksidan från REC till ON. Klart!

### Spela upp meddelandet

Tryck på den stora färgade kontaktytan på framsidan av BIG TalkingBrix för att spela upp ditt meddelande.

### Koppla ihop flera BIG TalkingBrix

Du kan koppla ihop flera BIG TalkingBrix och på så vis få flera olika trycktytor i samma apparat. Koppla samman de genom att haka i fästena på sidorna av enheten.



## Använd bildstöd med det medföljande locket

Bildstöd om max 77 mm i diameter med symboler, bilder, foton och/eller text kan användas för att förtydliga vad ditt meddelande handlar om.

Lyft det transparenta locket, placera ditt bildstöd ovanpå den färgade tryckytan och sätt tillbaka det transparenta locket.

## Montering

BIG TalkingBrix har en inbyggd magnet som gör den enkel att montera på metalliska eller andra magnetiska ytor, exempelvis en kylskåpsdörr.

Du kan även använda kardborreband/velcro för att montera.

## Ladda batteriet

När batteriet behöver laddas kommer LED-lampan att blinka rött tre gånger efter att du har spelat upp ditt meddelande. Anslut BIG TalkingBrix till den medföljande laddaren. Lampan kommer att ha ett fast rött sken under tiden batteriet laddas. När lampan blir grön är batteriet fulladdat.

*Du kan inte använda BIG TalkingBrix under tiden som batteriet laddas.*

## Överhettningsskydd

BIG TalkingBrix har ett inbyggt överhettningsskydd. Om batteriet når en temperatur på mer än 45 °C kommer enheten automatiskt att sluta fungera. Så snart som batteriet svalnat börjar den fungera igen.



# funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)