

Timstock

Visuellt tidshjälpmedel
för nedräkning av tid



Vad är en Timstock?

Timstock är ett svenskutvecklat tidshjälpmedel som visuellt räknar ner tid med hjälp av lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en till dess att tiden är slut och då larmar Timstock.

Använder du din Timstock regelbundet kan det hjälpa dig att utveckla din tidsuppfattning samtidigt som den kan minska stress och frustration i vardagen.




Kom igång med Timstock



Ställ in tiden

Tryck på knappen som visar den tid du vill ha. Lamporna tänds och nedräkningen börjar.

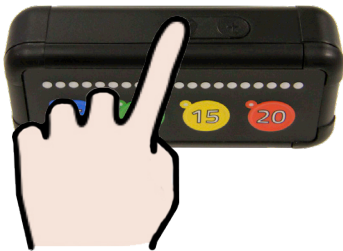

Höj eller sänk volymen på larmet

Tryck på knapparna på ovansidan för att höja eller sänka volymen på larmsignalen.

- ⊕ Tryck för att höja volymen
- ⊖ Tryck för att sänka volymen

För ljudlöst läge håll ⊖ intryckt under 1,5 sek.



Larm med ljud, ljus och vibration

När tiden är ute larmar Timstock med blinkande dioder, vibration och ljudsignal. Höj och sänk volymen på ljudsignalen med volymknapparna. Volymen har 8 olika lägen. När högsta resp. lägsta volym är uppnådd vibrerar Timstock under 1 sekund.

För ljudlöst läge håll **⊖** intryckt under 1,5 sek.

För högsta volym håll **⊕** intryckt under 1,5 sek.

Vattentät

Timstock är IP67-klassad, vilket innebär att den är damm- och vattentät. Din Timstock går alltså att använda i duschen och utomhus.

Batteridrift

Timstock drivs av två AA-batterier. Batterier medföljer vid leverans. Dessa räcker för ca 60 timmars användning innan de behöver bytas.

När lysdiodernas sken börjar avta ska båda batterierna bytas ut mot nya.



Låsskruv till batteriluckan

Låsskruv till batteriluckan

Byt batterier så här:

1. Skruva upp batteriluckans låsskruvar med en liten stjärnskruvmejsel.
2. Byt batterierna till nya AA-batterier. Titta så du sätter dem åt rätt håll, + och -.
3. Skruva på batteriluckan igen.

Ta ur batterierna om du inte ska använda din Timstock under en längre period.

Avbryt påbörjad nedräkning

En påbörjad nedräkning kan avbrytas med hjälp av ett kortkommando: håll de yttersta knapparna (blå och röd) nedtryckta samtidigt i 2 sekunder för att nollställa nedräkningen.

Ljusdiod visar vilken tid som är aktiv

Bredvid varje knapp där du väljer tid finns en liten diod som tänds för att visa aktiv tid.

Hörn i gummi ger ökad hållbarhet

Runt varje hörn finns en förstärkning av gummi som ökar hållfastheten hos Timstock.

Hål för nyckelband

På ena sidan av Timstock finns ett hål där du fäster tillbehöret Nyckelband för att bära Timstock runt halsen. Nyckelbandet säljs separat, kontakta oss för mer information.



Använd alltid originaltillbehör till din Timstock, kontakta oss om du är osäker.

Rengöring

Vid rengöring, torka av Timstock med en fuktig och luddfri trasa med vanligt rengöringsmedel, alternativt med rengöringsduk avsedd för elektronik.

Miljö & Garanti

Vi lämnar 2 års garanti för fabriktionsfel. Garantin täcker inte handhavandefel.



Timstock innehåller elektronik och ska därför återvinnas som elavfall. Detta lämnas normalt till din återvinningscentral, kontakta kommunen om du är osäker.

Specifikationer

Dimensioner	105x47x28 mm
Vikt utan batterier	75,2 g
Vikt med batterier	121 g
IP-klass	IP67 (damm- och vattentät)
Omgivningstemperaturer	-10°C till +40°C
Strömkälla	2 st 1,5V R6/AA-batterier



Timstock är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se