



BRUKSANVISNING

QuickTalker FT 7 / 12 / 23

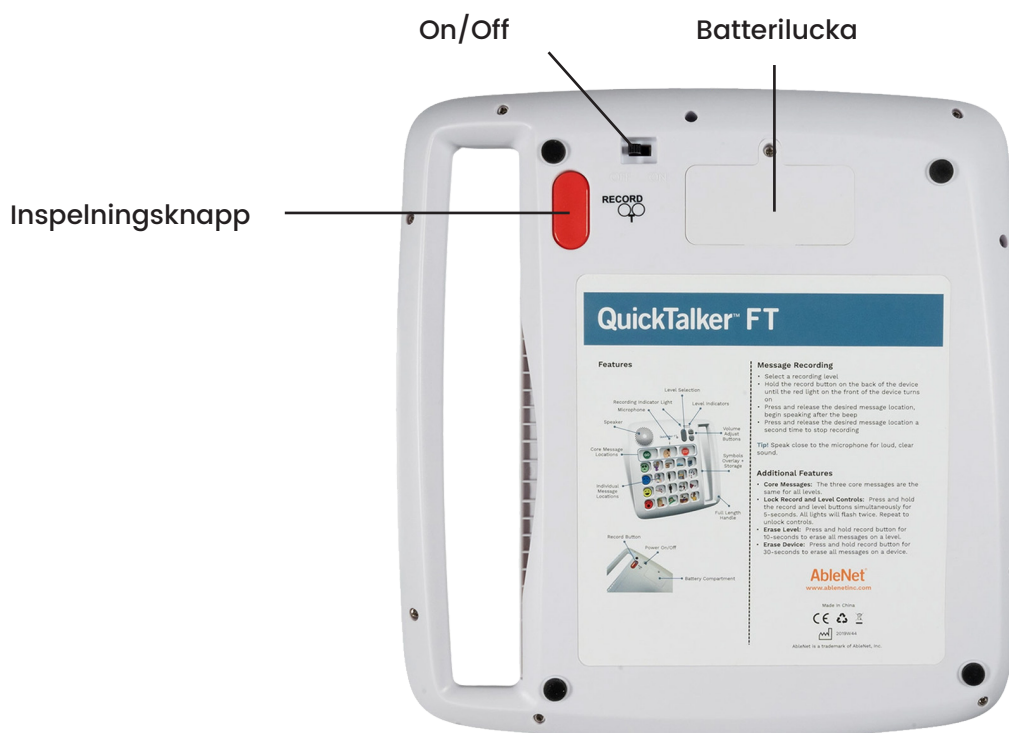

Översikt funktioner

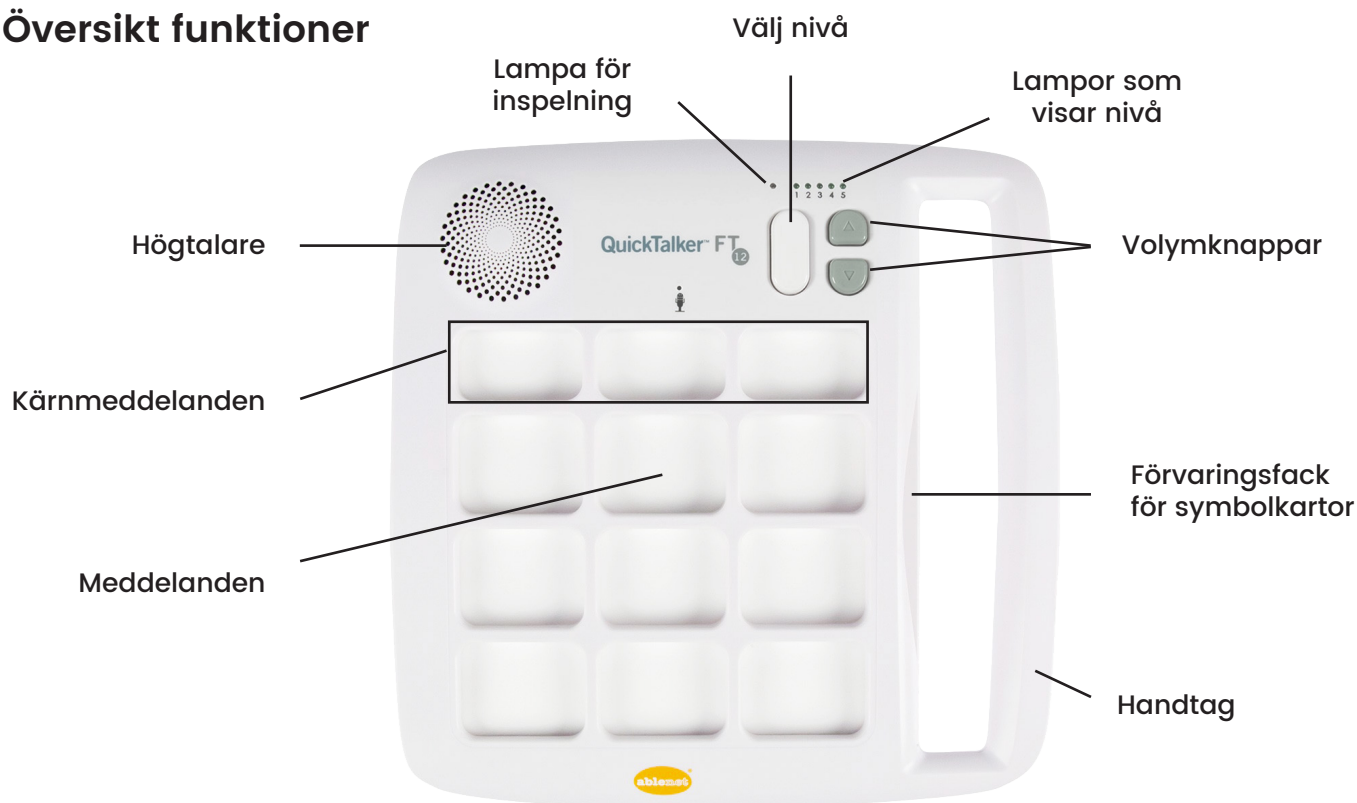

Slå på din QuickTalker

QuickTalker drivs på 4 st AA-batterier.

Skruva upp batteriluckan på baksidan av din QuickTalker. Sätt i 4 st AA-batterier i enheten och skruva därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på din QuickTalker genom att dra den lilla spaken "On/Off" till On.

Välj nivå

QuickTalker har fem nivåer. Tryck på den stora grå knappen på framsidan (Välj nivå) för att växla mellan nivå 1, 2, 3, 4 eller 5. Lamporna över siffrorna visar vilken nivå du befinner dig på.

Spela in meddelanden

1. Aktivera Inspelningsläget

Tryck och håll inne den stora röda knappen på baksidan (Inspelningsknapp) tills den röda indikatorlampan för inspelning tänds. Inspelningslampan sitter på framsidan av enheten.

2. Spela in meddelanden

Tryck på valfri meddelanderuta. Efter pipet kan du börja tala in ditt meddelande. När du är klar trycker du på samma ruta en gång till för att spara inspelningen. Upprepa sedan samma procedur för varje ruta du vill spela in ett nytt meddelande på.



Tala ca 15-20 cm från mikrofonen för bästa ljudkvalitet!

3. Avsluta inspelningsläget

Tryck och släpp den röda Inspelningsknappen på baksidan. Inspelningslampan slocknar. *OBS! QuickTalker avslutar automatiskt Inspelningsläget efter 20 sekunders inaktivitet.*

Spela upp meddelande

Tryck på valfri meddelanderuta för att spela upp meddelandet.



Om du trycker på en annan ruta avbryts uppspelningen.

Om det finns ett inspelat meddelande kommer lampan för inspelning att blinka gult. Om lampan blinkar rött finns det ingen sparad inspelning på rutan i den aktuella nivån.

Höj och sänk volymen

Tryck på de grå pilknapparna bredvid nivåknappen för att höja eller sänka volymen.

Radera meddelanden

Radera ett specifikt meddelande

Gå in i Inspelningsläge, tryck kort på meddelanderutan. Avsluta inspelningen.

Radera alla meddelanden på samma nivå

Tryck och håll nere Inspelningsknappen i 10 sekunder för att rensa hela nivån.

Notera att detta inte raderar Kärnmeddelanden eftersom de inte hör till en specifik nivå.

Radera alla inspelningar på enheten

Tryck och håll nere Inspelningsknappen i 30 sekunder så raderas samtliga meddelanden.

Detta raderar även Kärnmeddelanden och tömmer alla nivåer.

Kärnmeddelanden

De tre kärnmeddelandena kommer att vara samma oavsett nivå.

Syftet med detta är att kunna lagra inspelningar som används ofta, t ex "Ja" och "Nej".

Låsfunktion för att undvika oavsiktlig redigering

Det går att låsa QuickTalker så att Inspelningsknappen och Nivåknappen inaktiveras.

Tryck och håll nere Inspelningsknappen och Nivåknappen samtidigt under 5 sekunder.

Alla lampor blinkar två gånger för att bekräfta att enheten är låst för ändringar.

Om du av misstag har råkat låsa enheten eller vill möjliggöra redigering igen upprepar du bara samma procedur en gång till.

Rengöring, garanti & säkerhet

Enheten rengörs bäst med en lätt fuktad trasa. Två års garanti gäller för defekter som kan härledas till fabriktionsfel. QuickTalker FT är certifierad som medicinteknisk produkt enligt MDR, Klass I.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se