

BRUKSANVISNING

Time Timer MOD




Översikt

Time Timer MOD är ett visuellt tidshjälpmiddel i form av en timer. Med vredet i mitten drar du upp en färgad skiva tills du når den tidsmängd som du vill räkna ner. Den färgade skivan försvinner sedan mer och mer allt eftersom tiden går. När tiden är ute är skivan borta och du kan välja om du vill att klockan ger ifrån sig en ljudsignal eller inte. Olika modeller har olika maximal tidsmängd.



Sätt igång nedräkning


Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.

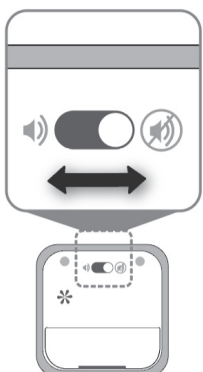

Ljud på/av

Dra spaken på baksidan åt höger för att stänga av ljudet och åt vänster för att sätta på ljudet.

 Ljud på

 Ljud av



Byt batteri

Öppna batteriluckan på baksidan av Time Timer MOD. Sätt i ett nytt AA-batteri. Titta så att du sätter i batteriet åt rätt håll:
- åt vänster och + åt höger.



Sätt på och ta av skalet

Börja med att lossa ena hörnet av skalet på klockans framsida. Lossa därefter övriga hörn och ta av skalet.



Sätt på skalet genom att föra in klockan baksida i skalet. Fäst hörnen på framsidan.

Rekonditionering och återvinning

Ta alltid ur batteriet innan du rengör Time Timer MOD. Den kan rengöras med de flesta milda rengöringsmedel och desinfektionsmedel på marknaden. Använd alltid en väl urvriden trasa och undvik att rengöringsmedlet rinner.

Time Timer MOD återvinns som elavfall. Lämna alltid in en trasig produkt till återvinning. Den innehåller värdefulla metaller och andra material som bör gå tillbaka in i kretsloppet. Följ alltid lokala angivelser för återvinning, hör med din kommun om du är osäker.



Alla modeller som omfattas av denna bruksanvisning är klass I medicintekniska produkter enligt förordning EU 2017/745.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se